



**ComfortSystem**  
*- för trygg omvårdnad*

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV  
**QURIR**


**VIKTIGT**

**QURIR Fotlyft är utprovad på ComfortSystems sängsortiment .  
Om montering sker på annat fabrikat skall ett godkännande ges av  
berörd sängtillverkare.**

- **BESKRIVNING AV COMFORT QURIR**

QURIR är ett hjälpmedel som hjälper brukaren att få upp fötterna ifrån golvet, hela vägen till mitten av sängen.

- En del brukare kan genom QURIR klara sig själv i detta moment, medans det för andra kräver assistans av vårdare/anhörig.
- Lyft och förflyttning av ben/fot består av tunga moment som genom QURIR underlättas betydligt.
- Vid användandet av QURIR sker en viss vridning av höften som med fördel kan avlastas genom att lägga en "mjuk vrid platta" under den del där vridning uppstår.

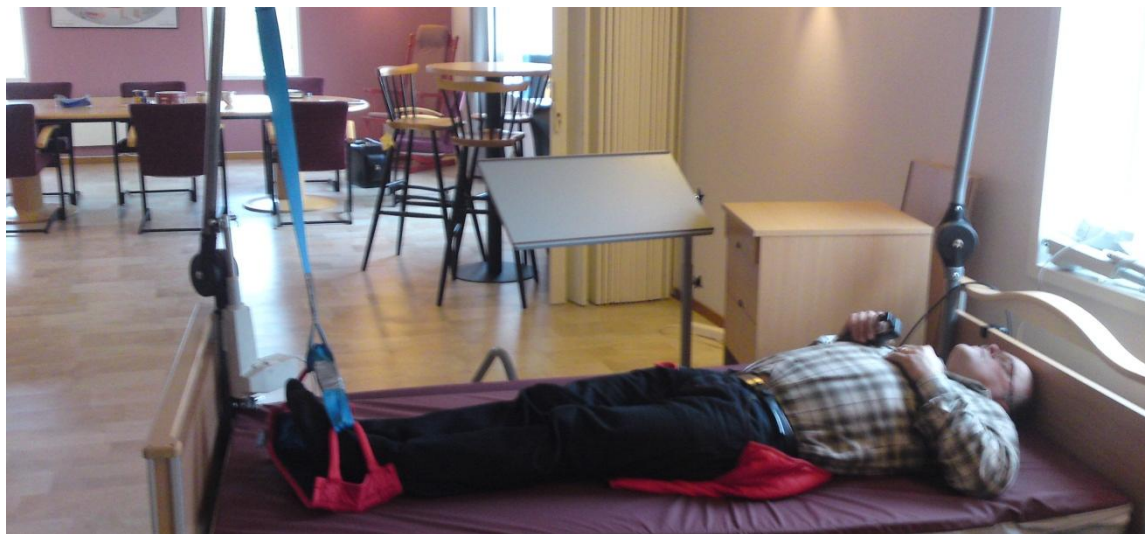

## PLACERING AV FOTKORG

Sänk ner fotkorgen till golvet genom att köra ner fotlyftens arm till en höjd som passar till sänghöjden.

Placera om möjligt en mjuk vridplatta eller dylikt under rumpan så att friktionen minskas under vridningen.

Sitt lite snett på sängkanten med fötterna på golvet.

Sätt in båda fötterna i fotkorgen så att hämlarna kommer ca 5cm in i fotkorgen.

Kör upp sängryggen som stöd under lyftet eller stöd med handen i madrassen så att magen får stöd.

Sitt så högt upp i sängen så att fötterna inte tar i fotgaveln under lyftet.

Höj j fotlyften så att fötterna lyfts hela vägen ifrån golvet in i sängen.

Frigör fötterna ur fotkorgen genom att lirka med fötterna eller genom hjälp.



## Andra användningsområden

QURIR fotlyft kan även användas till andra tunga moment i sängen. Här kommer några **exempel** som går att utföra med vår standard fotkorg. ComfortSystem jobbar även kontinuerligt tillsammans med kunder för att utveckla andra varianter av fotkorgar och stöd till QURIR fotlyft.

### **FOTVÅRD**

Placera fotkorgen lite längre upp mot vaden så att foten frigörs. Höj till en lämplig höjd för både vårdare och brukare.

### **OMLÄGGNING AV SÅR**

Justera fotkorgens läge så att området som ska behandlas blir frilagt.

### **AVLASTNING FÖR HÄL, HÖFT MM**

Rodnader på häl är vanligt och kan här avlastas tillfälligt.

### **HÖGLÄGE AV FOT ELLER FÖTTER**

Svullnader kan tillfälligt avhjälpas genom högläge.