



ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

MONTERINGSANVISNING

SÄNGRAM

QIDDYBED





1. Montering av gavel



Montera gavlarna med 8st skruvar (pinnbult 50mm + skruvhuvud) och mutter, 4st per sida.

Skruva inte åt för hårt, då finns risk att man knäcker ytskiktet på gaveln och hållbarheten försämras.



2. Montering av långsida



Montera långsidan genom att hänga den på de utstående övre svarta och nedre vita plastdetaljerna. Långsidan hänger på de svarta i uppfällt läge och glider på de vita vid sänkning.

Ställ in excenterlåsen så de låser fast långsidan genom att skruva det i längdsled.





3. Montering av dörrar



Dörrarna monteras i gavlarna med 4st skruvar (40mm pinnbult + skruvhuvud), 2st per sida.

Viktigt att låsningen på dörrparet kommer rätt så låshandtaget kommer på utsida av säng

