




Instruktioner för användare av MULTI SKÖTBORD

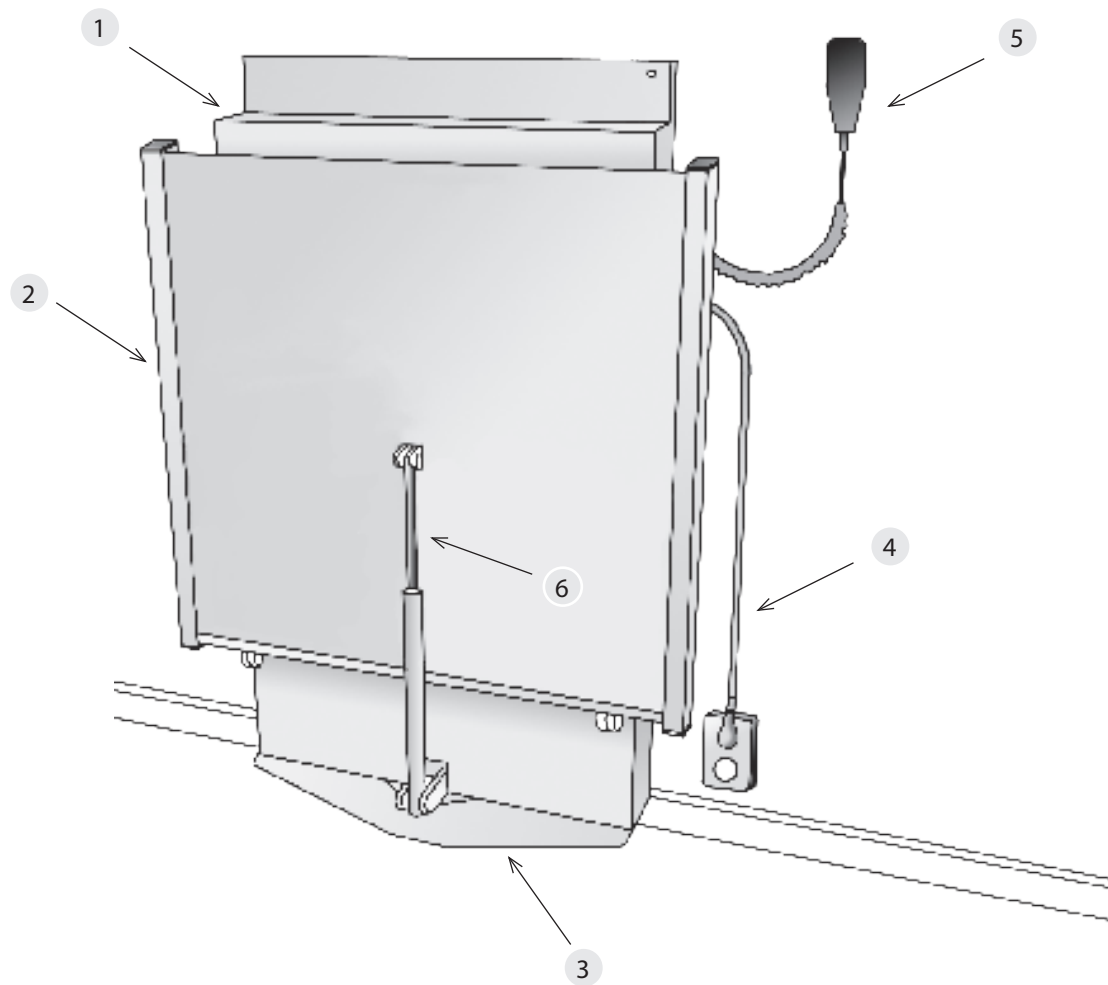

1. Vägghöjningsstativ inkl motor och elektronik.
2. Fällbar skiva inkl madrass.
3. Klämskydd
4. Nätkabel
5. Handkontroll för manövrering upp/ner
6. Gasfjäder

Denna principskiss visar hur MULTI skötbord skall se ut efter montering!





INTRODUKTION

ComfortSystem Scandinavia AB har nöjet att leverera ett elektriskt höj- och sänkbart skötbord.

Endast behöriga personer får använda detta elektriska skötbord. Genom att använda skötbordet förbinder sig användaren att ta del av och följa instruktionerna.

Instruktionen ska finnas tillgänglig för behöriga personer, samt åtfölja produkten om den flyttas till annan installationsplats.

Avsedd användning

Skötbordet är avsett att höja och sänka skötbordsytan till en för användaren lämplig arbetshöjd. Produkten är avsedd att användas inomhus, i normala bostadsförhållanden avseende temperatur och luftfuktighet.

Tillverkare

ComfortSystem Scandinavia AB

Vistakullevägen 18

56146 Huskvarna

E-post: info@comfortsystem.se

Telefon: 036-51590

Monteringsanvisning

MULTI Skötbord är avsett för montering på vägg.

⚠ Kontrollera därför att aktuell vägg klarar den belastning som skötbordet medför och att det finns tvärgående regler eller motsvarande att skruva bordet i. Om regler saknas finns en sats med 'Monteringskonsol' som tillhör (art.nr 1190).

Kontrollera också att bordet får plats – se erforderliga mått enligt skiss.

⚠ TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbord skall placeras vid en vägg skall måttet mellan vägg och skötbordsskiva vara mindre än 5 mm eller större än 300 mm.


⚠ TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbords sida skall placeras vid en tvättbänk eller liknande, skall bänken vara helt täckt mot skötbordet för att förhindra att ben eller fötter hamnar i kläm under bänk/tvättbänken vid höjning av skötbordet.

Måttet mellan bänk och skötbordsskiva skall vara mindre än 5 mm eller större än 300 mm!

Montera skötbordet på lämpligt vis så att det är möjligt att ansluta till ett jordat vägguttag.

OBS! Nätkabel skall vara tillräckligt lång så att den kan följa skötbordet upp och ner!


⚠ TÄNK PÅ: Om vägguttaget är monterat eller skall monteras i vått utrymme måste det föregås av jordfelsbrytare.

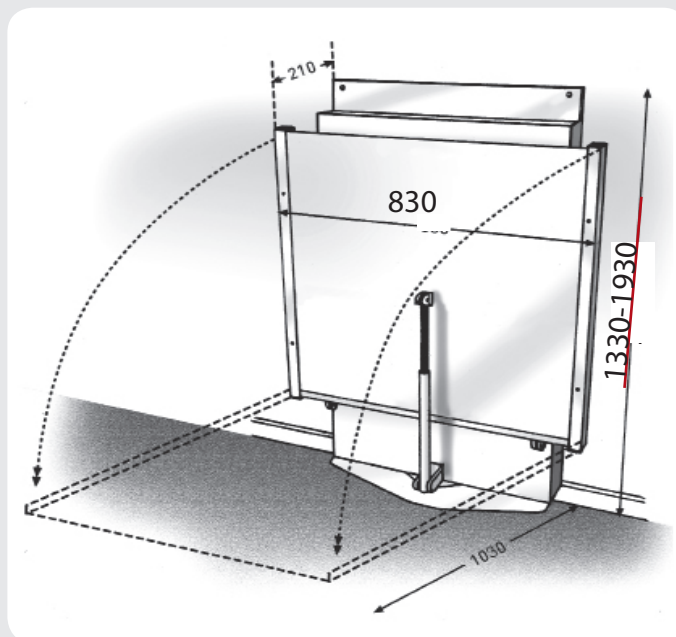

1 Justera Bordet

Ställ bordet i våg genom att justera ställfötterna. Placera bordet mot väggen.


 Bordet skall stå mot golvet. Det får ej 'hänga' på väggen!

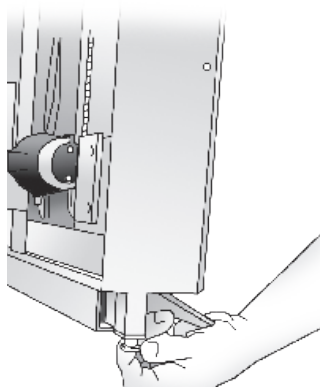

2 Skruva fast bordet – övre fästpunkter

Lossa täckpluggarna i stativets överkant.


Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult alternativt mot monteringskonsol och återplacera täckpluggarna.

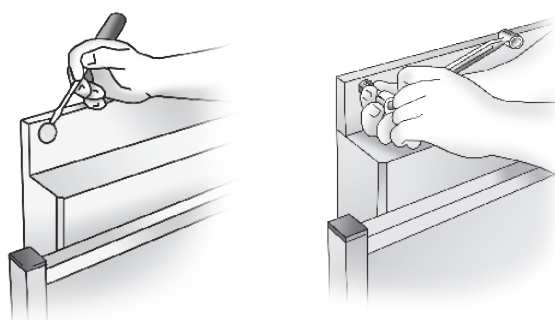

3 Skruva fast bordet – nedre fästpunkter


Sätt i kontakten i vägguttaget, kör upp skötbordet så att bordets nedre fästöron blir synliga.


Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult alternativt mot monteringskonsol.

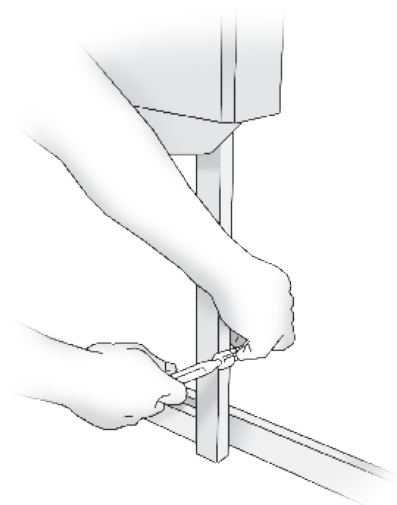

4 Kontrollera klämskyddets funktion

MULTI Skötbord är utrustat med klämskydd som skall stoppa bordet om något kommer i vägen vid nerfart. Kontrollera klämskyddets funktion genom att köra bordet neråt och samtidigt trycka upp klämskyddet. Bordet skall nu stanna!

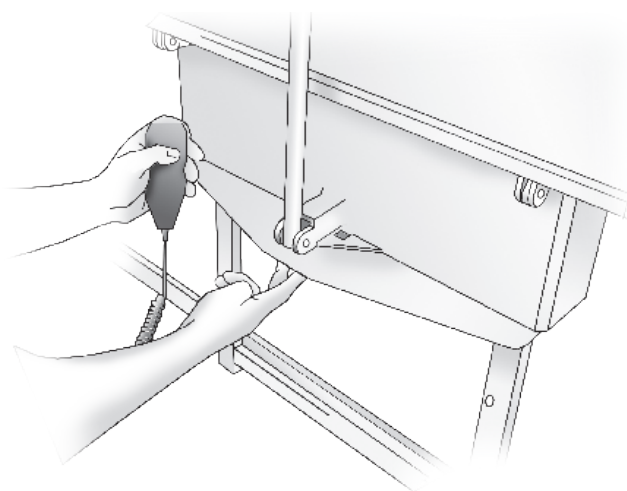


 Om klämskyddet ej fungerar ta bordet ur drift och tillkalla reparatör




Bruksanvisning

Vid användning fälls skötbordets skiva ut i horisontellt läge. När bordet ej används fälls skivan upp mot skötbordets stativ. Bordet hålls på plats i uppfällt läge med hjälp av gasfjäder – skivan behöver därför ej låsas i uppfällt läge.

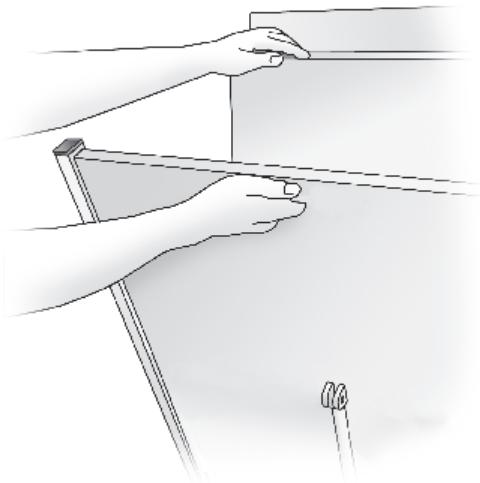

Kör bordet upp eller ner genom att trycka på handkontrollens UPP resp NER knapp. Bordet kör så länge knappen hålls nedtryckt. Bordets lägsta höjd är ca 30 cm och högsta höjd ca 90 cm.

⚠ När bordet ej används skall handkontrollen placeras så högt att barn ej kan komma åt kontrollen!

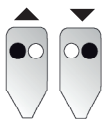

⚠ MAX BELASTNING = 50 kg

⚠ HA TILLSYN ÖVER BARNET NÄR BORDET KÖRS UPP ELLER NER

⚠ LÄMNA EJ BARNET PÅ BORDET UTAN TILLSYN

Skötselansvisning

1 Normal rengöring

- Skötbordets lackerade metalldelar kan rengöras med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings och desinfektionsmedel kan användas.
- Skötbordets dyna kan rengöras med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings och desinfektionsmedel kan användas. Går även att maskintvättas 60 °C.

2 Smörjning

- Om det uppstår gnisslande ljud vid användning, skall stativets gejdor behandlas med ex vis vaselin eller liknande smörjmedel. Kör upp bordet i högsta läget och påför smörjmedel på stativets vertikala gejdor.

3 Tillsyn

Punkt 1-3 rekommenderas löpande

- Kontrollera att nätkabel är oskadd och att den löper fritt.
- Kontrollera att manöverdonets kabel är oskadd och att den löper fritt.
- Kontrollera bordets undre klämskydd genom att köra upp bordet i högsta läge. Kontrollera att den 'trekantiga' klämskyddsplåten löper fritt. Testa funktionen genom att köra bordet nedåt och manuellt påverka klämskyddet. Motorn skall stanna då klämskyddet aktiveras.
- ⚠ Om klämskyddet EJ fungerar skall bordet tas ur drift och reparatör tillkallas!!
- Kontrollera bordets infästning i väggen. Får EJ finnas tendens till att det lossnat i infästningspunkterna.
- Kontrollera skötbordsskivans infästningar samt infästningar för fällmekanism och gasfjäder.

