



ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

INSTRUKTIONER / MONTERINGSANVISNING
FÖR ANVÄNDARE AV
QURIR

VIKTIGT !!!

QURIR Fotlyft är utprovad och godkänd på ComfortSystem`s sängsortiment.
Om montering sker på annat fabrikat skall ett godkännande ges av berörd sängtillverkare.

Produkten innehåller:

Fotlyft CS35

Fotkorg CS350130

Lyftband till fotkorg CS350136

Elektronik CB8001T50-1010

Manöverdosa J00424

Beskrivning av QURIR Fotlyft

Qurir hjälper brukaren att få upp fötterna från golvet, hela vägen till mitten av sängen.

Lyft och förflyttning av ben/fot består av tunga moment som genom QURIR underlättas.

Vissa brukare kan genom QURIR klara sig helt själva genom lyftet medans andra kan behöva assistans med vissa moment av utomstående.

Vid användande av QURIR sker viss vridning av höften som med fördel kan avhjälpas med en "mjuk vridplatta" under brukare som avlastar under vrid momentet.

Montering av Fotlyft

QURIR Fotlyft är endast avsedd för montering i tillbehörsfästet som sitter i fotänden av säng!

Montera Fotlyften i tillbehörsfästet på motsatt sida från där ni planerar utföra benlyftet.

Fotlyften jobbar diagonalt över sängen.



Montering av elektronik och manöverdon

Elektroniken monteras på antingen fotgavel (om dess utformning tillåter) eller på sängens långsida. Innanför trägrind på metallram.

Alt. 1 Häng elektronik på gavelskiva under överliggaren. Se till att nätsladd placeras så den inte skadas i det dagliga användandet.

Alt. 2 Häng elektroniken på sängens metallsida där den passar in. Häng elektronik på samma sida som fotlyften är monterad. Se till att nätsladd placeras så den inte skadas i det dagliga användandet.

Tryck in manöverdonets kontakt i avsedd port i elektroniken. Kontrollera att stiften hamnar korrekt.

Sätt nätsladd i väggen


Montering av fotkorg & lyftband

Trä lyftbandet genom fotkorgens båda lyftöglor.

Fäst lyftbandets öglor i kroken på fotlyftens främre lyftrör

Banden skall ej vara tvinnade.

Dubbelkolla krokens låsning.

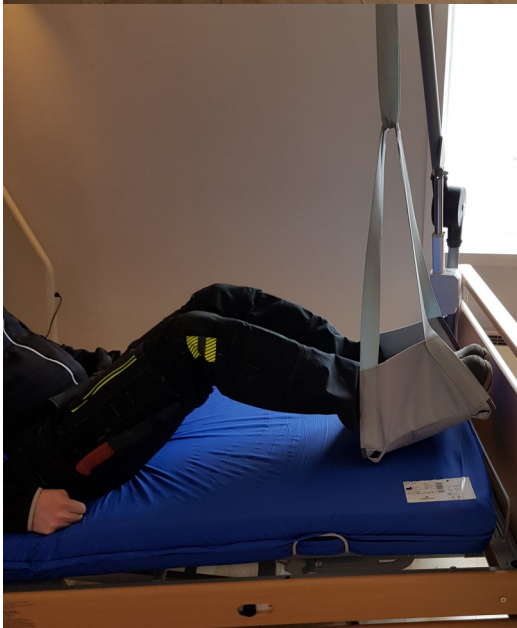

Placering av fotkorg

Sänk fotkorg till golvet genom att trycka på manöverdonets NER knapp.

Placera om möjligt en "mjuk vridplatta" under rumpan så att friktionen minskas under vridning

Sitt på sängkanten med fötterna i golvet, vrid upp kroppen mot fotkorgen.

Kör upp sängens rygg som stöd under lyftet med QURIR alt. stöd med handen i madrassen så magen får stöd.

Placera dig i sängen så inte fötterna tar i fotgaveln under lyftet.

Sätt in båda fötterna i fotkorgen. Hälarna skall komma ca. 5cm in i fotkorgen.

Höj fotlyften med manöverdonets UPP knapp hela vägen från golv till mitten av säng.

Ta fötterna ur fotkorgen.

Andra användningsområden

QURIR Fotlyft kan även användas till andra tunga moment i sängen.

Några exempel:

Fotvård

Placera fotkorgen längre upp mot vaden så foten frigörs.

Höj till lämplig höjd för både vårdare och brukare

Omläggning

Justera fotkorgens läge så området som skall behandlas frigörs.

Avlastning

Rodnader på häl är vanligt förekommande och kan här avlastas tillfälligt

Högläge

Svullnader av fot eller fötter kan tillfälligt avhjälpas genom högläge



ComfortSystem Scandinavia AB | Tel +46 (0)36 515 90 | info@comfortsystem.se

www.comfortsystem.se