

Avser art.nr CS66, CS67, CS68, CS69, CS36-2, CS37-2, CS38-2, CS39-2



1. Placera sängryggstödet centrerat i sängen huvudända enligt **Bild 1**. Montera spännbanden genom sängryggstödet fixeringsöglor enligt **Bild 2**.



2. Drag spännremmarna runt om sängens undersida, se till att spännanordningen på remmarna hamnar på sidan av sängen enligt **Bild 1**. Koppla samman remmarna med spännlåsen och drag åt dessa hårt.



3. Sängryggstödet regleras från handkontrollens två knappar Upp (↑) och Ner (↓)



4. Tillbehör

**A. Stöd och vändhandtag** - Art. nr. 8000201-2  
Underlättar vändning i säng och ger ett bra stöd vid uppresning.

**B. Sittlås** - Art.nr. 8000200  
Förhindrar att sängryggstödet åker högre upp i säng och förbättrar låsning av sängryggstödet i sidled.

**C. Spännband 600cm** - Art.nr. 96-25692-600901  
Vid montering av sängryggstöd där det krävs längre spännrem.



5. Se vår instruktionsfilm på [www.comfortsystem.se/se/filmarkiv](http://www.comfortsystem.se/se/filmarkiv)



MADE IN SWEDEN


Avser art.nr CS36-2, CS37-2, CS38-2, CS39-2



1. Placera sängryggstödet på högkant med motorpaket uppåt enligt bild ovan.



2. Skruva bort ratten för att lossa det L-formade fästet med motorn.

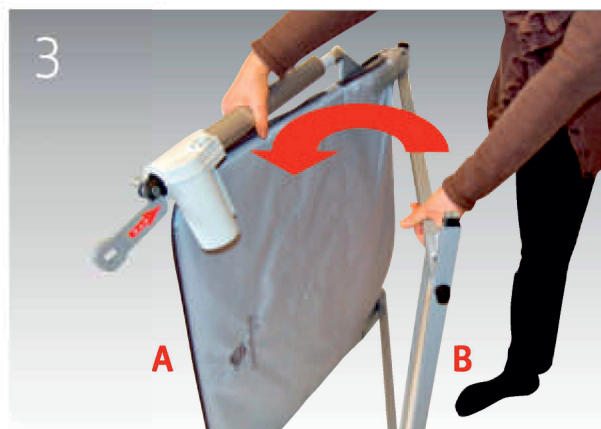

3. Håll ett stadigt tag med ena handen om motorn och delen med ryggtyg (A). Vrid runt delen utan ryggtyg (B) 360° till den möter delen med ryggtyg på nytt.



4. Vrid över motorpaket ett halvt varv så att pilen på det L-formade beslaget pekar mot den undre delen av sängryggstödet enligt bild ovan.



5. Sätt tillbaka det L-formade fästet med bricka och skruva åt ratten.

**OBS! Säkerställ att det L-formade beslaget med röd pil pekar ner mot golvet vid montering på säng.**

