




# Instruktioner för användare av Sänggram med integrerad grind 3-60

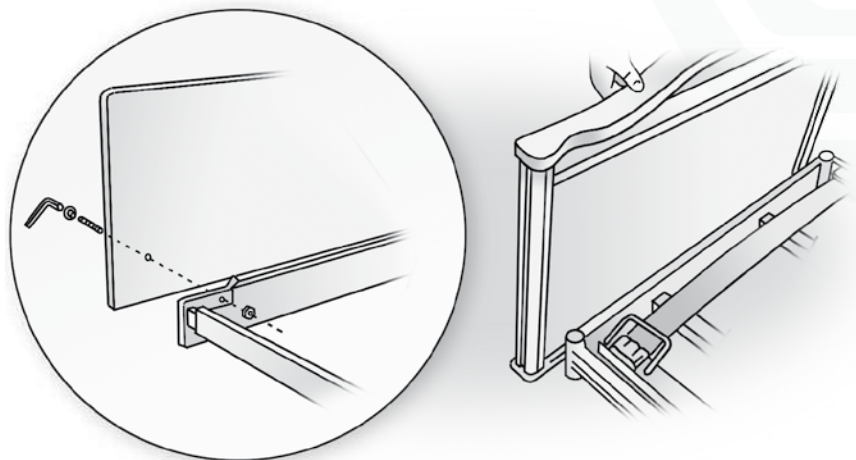

Produkten är ett tillbehör och får enbart användas till Qvintett vårdängar, tillverkade av ComfortSystem Scandinavia AB. Denna bruksanvisning är ett kompletterande dokument till Instruktion för användning av Qvintett vårdängar, modell CS4, dokument namn "CS4.MB12-XX". Samtliga riktlinjer i vårdängens instruktion ska alltid tas i beaktande i sin helhet i kombination till det här dokumentet.

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats [www.comfortsystem.se](http://www.comfortsystem.se).



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.

Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.





## Kompatibilitet

Den här bruksanvisning avser Sängram 3-60, art.nr 457XXX, 455XXX, tillverkade efter 2023-09-01

## Monteringsanvisning

### 0.0 Leveransen omfattar

- 1 st huvudgavel
- 1 st fotgavel
- 2 st övre grindbommar (med uttag för låsmekanism)
- 2 st undre grindbommar (rak plastdetalj)
- 1 st skruvpåse



OBS! Montering kräver verktyg i form av lämplig insex-nyckel eller skiftnyckel.

### 1.0 Montering gavlar

Montera ihop pinnbult och bultskalle (mässing).

Tryck i pinnbultarna i gavlarna.

Montera gavlarna på sängen men skruva inte åt utan låt gavlarna sitta löst så de 'hänger' ut så som bilden visar.

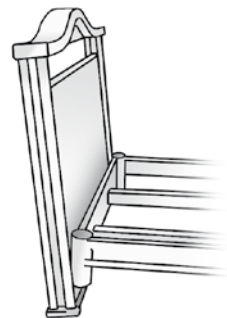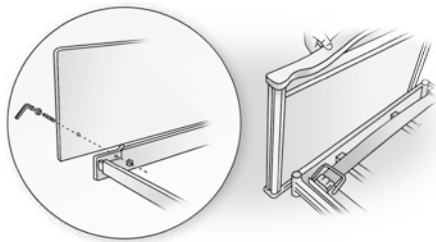



## 2.0 Montering 'undre' grindbom


Undre grindbommen kännetecknas av att den EJ har något uttag för låsmekanism.

OBS! "Lyftaren" är den lilla plastdetalj som sitter i gavlarnas spår.

Stick in den undre grindbommens plastdetalj i gavelspåret så att den hamnar i det nedre uttaget på lyftaren.



Tryck med fingret in plastdetaljen på grindbommens andra kortända och placera den på motsvarande sätt i gavelns lyftare.

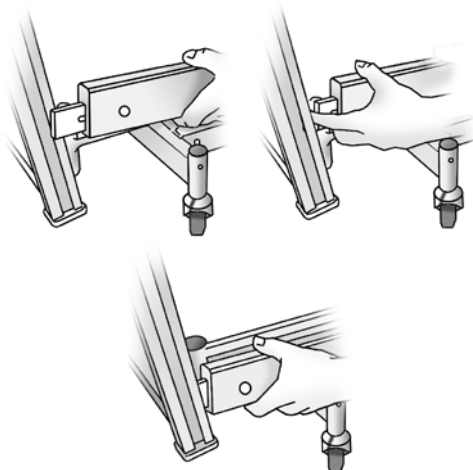





### 3.0 Montering 'övre' grindbom

Grindbom för placering i övre läge kännetecknas av uttag för låsmekanism.

OBS! Dessa uttag skall vara vända ut från sängen.


Stick in grindbommens plastdetaljer i grindspåret så att de hamnar i det övre uttaget på lyftaren. OBS! Även den lilla 'hakformade' plastdetaljen skall in i spåret.

Gör motsvarande för andra sidan av grindbommen. Tryck med fingret in plastdetaljen på grindbommens andra kortända och placera den på motsvarande sätt i gavelns lyftare.

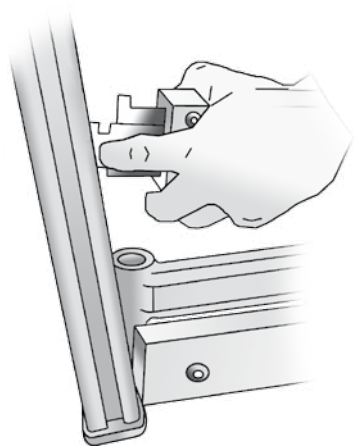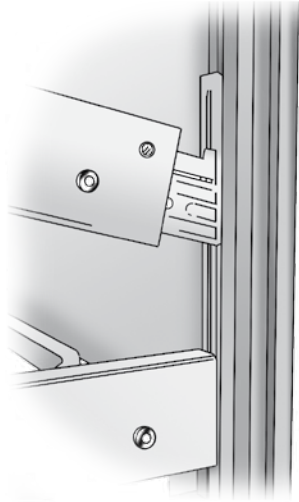




OBS! För att klara detta kan det vara nödvändigt att snedställa grindbommarna. Lyft upp den sida som är monterad!

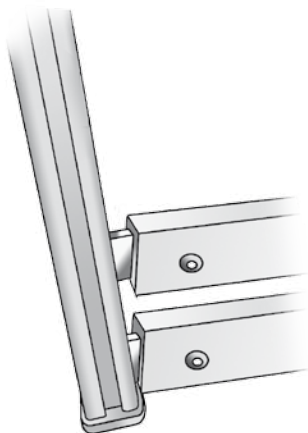

Efter att samtliga grindbommar är på plats (två grindbommar på var sida om sängen) skall gavlarna skruvas åt (se även punkt 1).



Kontrollera – om grindarna är rätt monterade skall det var ett mellanrum om ca 25 mm mellan grindbommarna.

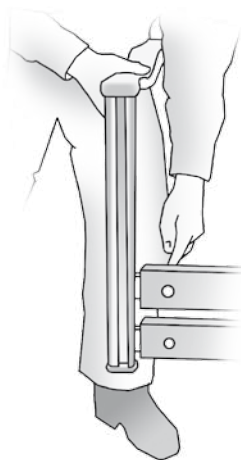



## Bruksanvisning

### 1.0 Att använda grinden


Grindbommarna tjänar i lägsta läge som "långsidor" till sängramen.

För att bilda grind:

- Placera händerna med ca 1 meters mellanrum med utgångspunkt från sängens mitt.
- Lyft enbart i den övre grindbommen så högt det går.
- Låsmekanismen låser grinden automatiskt i det översta läget.



Kontrollera att låsmekanismen fungerar genom ett lätt tryck nedåt på den övre bommen.

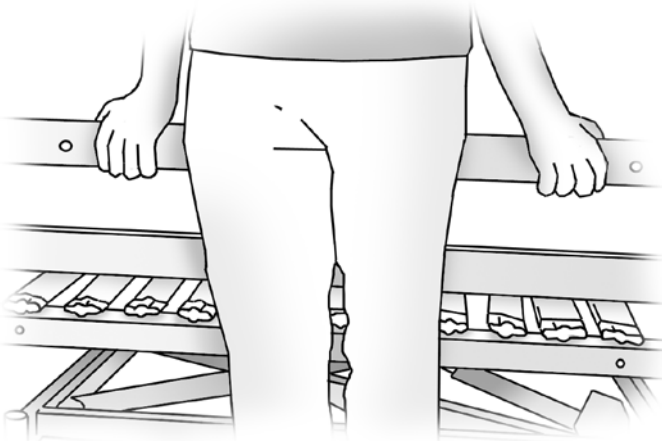




## 2.0 Att fälla ner grinden

I övre grindbommen finns två urtag (höger och vänster) för frigörning av låsmekanismen.

- Placera höger och vänster pekfinger i respektive urtag
- Lyft grindbommen uppåt och dra därefter bägge låsmekanismerna mot centrum
- Sänk ner grinden. OBS! Du behöver EJ hålla in låsmekanismen under sänkning.

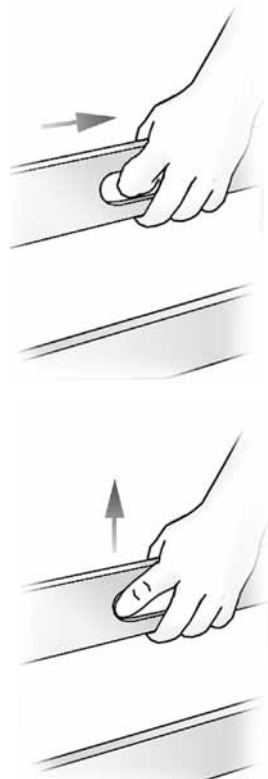

Kontrollera att den sängliggande inte har armar och ben mellan grindbommarna.



Grindar får EJ snedställas. En snedställd grind uppfyller EJ säkerhetsnormen enligt EN-norm för grindar!



### Max madrasshöjd

Grindarna är konstruerade för madrass med en maximal höjd om 15cm, för att bibehålla ett avstånd om 22cm, från sängbotten till sänggrindens överkant.

Vid behov av en högre grindhöjd kan grinden kompletteras med grindförhöjare från ComfortSystem.

## Skötselanvisningar

### Skötsel och rengöring

Sänggram med integrerad grind kräver normalt ingen löpande skötsel.

- **Normal rengöring.** Normalt inom vården förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas. Använd en fuktig trasa vid rengöring.
- **Om grinden upplevs som trög**  
Gavlarnas grindspår kan behöva smörjas för att gå lätt.  
Litiumfett på sprayburk (eller likvärdigt) rekommenderas.



### **Teknisk specifikation - Madrassmått**

Qvintett vårdssäng tillsammans med Sängram Opal/Safir 3-60 är avsedd för följande madrassmått. Vid behov av högre madrasser kan grindarna utrustas med grindförhöjare. Vid behov av att fylla ut utrymmet mellan madrass och grind finns madrassbreddare att tillgå.

#### **80cm**

Madrassbredd: 75-80cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 15cm

#### **90cm**

Madrassbredd: 85-90cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 15cm

#### **105cm**

Madrassbredd: 100-105cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 15cm

#### **120cm**

Madrassbredd: 115-120cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 15cm

## Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



**ComfortSystem**  
– vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem Scandinavia AB • Vistakullevägen 18 • 561 46 Huskvarna

• Sweden Tfn +46 (0)36 51590 • info@comfortsystem.se • www.comfortsystem.se