



Bruksanvisning för VENDLET HC-2 med timer

OBS! Bruksanvisningen gäller tillsammans med Comfort QVINTETT-säng!





Innan användning av VENDLET:

1) Vrid den röda knappen (STOP-knappen) för att koppla på strömmen till VENDLET.

2) Tryck på den gröna knappen för att aktivera timern i VENDLET. Innebär att du nu kan köra VENDLET under ca 90 sekunder. Krävs längre tid – upprepa tryckningen på den gröna knappen. Denna funktion skall förhindra ofrivilligt bruk av VENDLET!



Efter användning av VENDLET

1) Tryck på den röda knappen (STOP-knappen) för att bryta strömmen

Att fälla ner en sida:

1) Ta bort säkerhetslåsen

2) Lyft parallellt uppåt i översta rullen – fäll ner mot sängens sida.



Att fälla upp en sida:

- 1) Fäll upp sidan och lyft den samtidigt som den fälls in mot sängen tills den låsningen faller på plats.
- 2) Sätt i säkerhetslåsen.

Säkerhetslås (hårnalar)

Sätt i de 4 säkerhetslåsen i beslagen när sidorna på VENDLET är uppfällda i översta läget. Säkerhetslåsen förhindrar att brukaren genom våld kan få ner sidorna på VENDLET.



All uppmärksamhet skall vara riktad mot brukaren vid användning av VENDLET!



Tryck alltid på STOP-knappen för att avbryta strömtillförseln efter användning!



Monteringsanvisning

Montering av glidlakan (bild 1-2)

De elastiska banden i de fyra hörnen spänns runt madrassens fyra hörn. Fäst kardborrebanden runt sängbottens rörliga delar, rygg- och bendel. (EJ på sängens fasta delar, längsgående metallprofiler.)

Montering av draglakan (bild 3-4)

Placera draglakanet mitt på sängen med kardborrebanden nedåt! Tryck fast draglakanets kardborreband i motsvarande band som sitter på dragrullen. Drag inte i lakanet – är anpassat i bredd och längd! Se till att draglakanet sitter med lika avstånd på rullen på respektive sida.

⚠ OBS! Draglakanet skall monteras på ett sådant sätt att de vid bruk rullas ovanifrån på dragrullen!

Koppla på strömmen genom att vrida STOP-knappen samt tryck på den gröna knappen (timern). VENDLET är nu klar för manövrering under ca 90 sekunder.

Rulla upp lakanet på höger resp vänster rulle genom att trycka på röd resp blå knapp tills draglakanets röda rand ligger mitt i sängen! Slaka lakanet så att det ligger plant på madrassen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Skyddslångsida

Vid användande av Vendlet personvårdare på säng Comfort QVINTETT skall skyddslångsidan monteras med bifogad skruppåse.

Skyddslångsidan medföljer vid leveras av Vendlet personvårdare.

Sänggrind i plast (bild 5-6)

Om annan säng än Comfort QVINTETT används, skall sänggrind i plast användas för att skydda brukaren!

Slaka draglakonet på bägge sidor. Tryck ner/häng sänggrindarna över den översta rullen och ner mellan VENDLET och sängbotten. Krävs två sänggrindar på varje sida.

Avstånden mellan sänggrindarna och huvud-/fotgavel får EJ överstiga 60 mm!

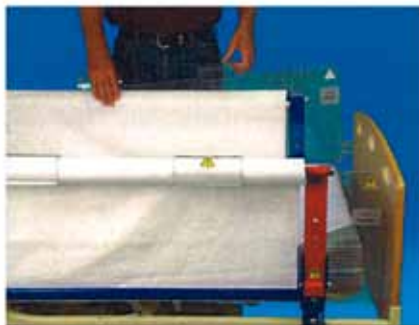


Bild 5

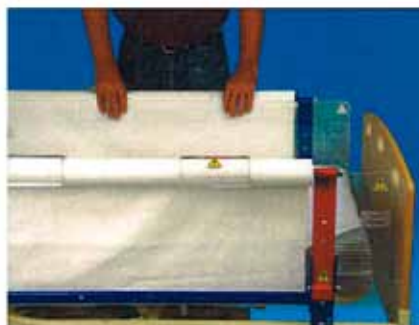


Bild 6



Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
– *vår erfarenhet din trygghet*

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna
Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • info@Comfortsystem.se