

## Kompletterande instruktion

### Nödfrigörning/nödsänkning av ryggdel

Nödfrigörning av sängens ryggdel kan göras vid t.ex. strömavbrott eller andra fel på sängens elektriska komponenter.



#### **WARNING!**

- Det krävs minst två personer för att utföra nödsänkning av ryggstödet.
- Risk för att klämma sig eller fastna uppkommer vid nödsänkning av ryggstödet. Ingen person eller kroppsdelar får finnas under ryggstödet vid sänkning.
- Gör sängen strömlös före nödsänkning av ryggdel.



#### **Gör så här:**

1. Minst två personer håller i ryggstödet.
2. En av personerna frigör och drar ut sprinten från ryggmotorns övre fäste.
3. Minst två personer sänker långsamt ned ryggstödet tills dess att det vilar mot sängbotten.