



ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

Instruktioner för användare av Comfort Uppresningsstöd RESOLUT



ComfortSystem
– vår erfarenhet din trygghet



Läs bruksanvisningen
innan sängen
tas i bruk!





1. Monteringsanvisning Comfort Uppresningsstöd RESOLUT

1.1 Montering

Innan montering:

 Uppresningsstödet skall vara uppfällt!

Uppresningsstöd RESOLUT placeras i något av sängbottens fyra runda uttag i resp hörn på sängen.

- Placera uppresningsstödet i uttaget så som **bild 1 och 2** visar. Spåren i botten på den undre rördelen skall passa in i uttagets diagonala stag.
- Den översta delen av uppresningsstödet skall 'peka' ut från sängens långsida. **Bild 2.**

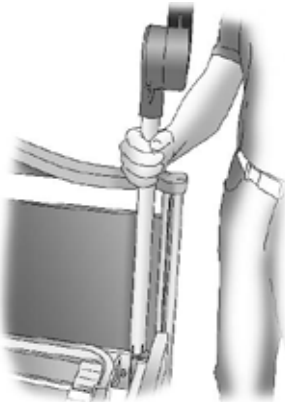


Bild 1



Bild 2



Kontrollera att uppresningsstödet sitter korrekt genom att försöka vrida det runt i uttaget – skall EJ gå!



1.2 Demontering

- Lyft uppresningsstödet rätt upp ur uttaget. **Bild 3.**

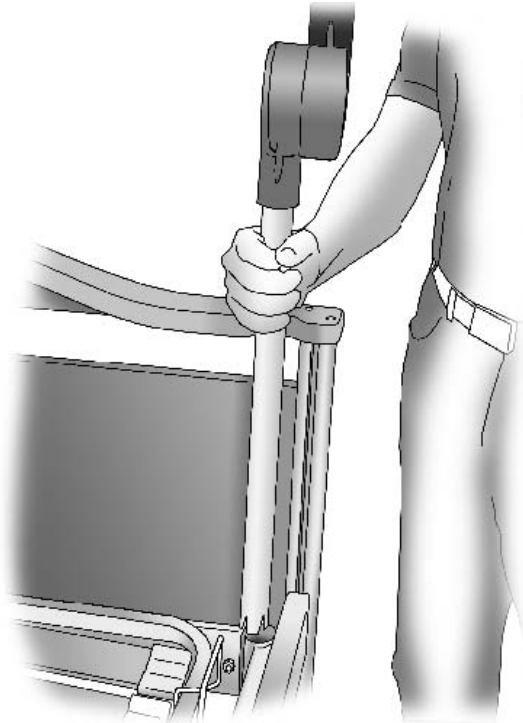


Bild 3

1.3 Användande

- Uppresningsstöd RESOLUT används som hjälp vid förflyttning till/från sängen. När det inte används kan det fällas upp till upprättstående ställning. Mekanism för låsning i olika positioner finns i stödets knutpunkt (den svarta runda detaljen i mitten!).
- Fäll ned eller upp den övre delen av uppresningsstödet genom att ta tag enligt **bild 4.**



I nedfällt läge stannar stödet i horisontellt läge. Vid uppfällning – fäll stödet rakt upp tills det 'fastnar' i upprättstående läge.

OBS! Vid användning för förflyttning till/från säng skall stödet användas enligt **bild 5**.

Användning enligt **bild 6** får EJ förekomma!!



Stödet får belastas med maximalt 75 kg!



Bild 4



Bild 5

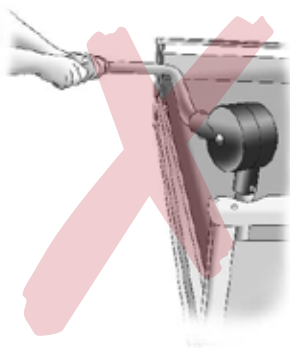


Bild 6



2. Skötselanvisning

Uppresningsstöd RESOLUT kräver normalt inget löpande underhåll.

2.1 Normal rengöring

Uppresningsstöd RESOLUT kan rengöras med vanligt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel. Appliceras med fuktig trasa.

2.2 Löpande tillsyn

Kontrollera regelbundet infästningen av uppresningsstödet och att det inte förekommer något onaturligt stort glapp i leden.

2.3 Belastning

- Belastning 75 kg (ej brukarvikt)

3. Användningsområden

Skall användas som hjälpmedel vid förflyttning till/från säng.

Uppresningsstöd RESOLUT får endast monteras tillsammans med Comfort Sängsystem, sängar tillverkade efter 1995.



ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
– vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem Scandinavia AB • Box 4034 • Vistakullevägen 18 • 561 04 HUSKVARNA • Sweden
Tfn +46 (0)36 51590 • Fax +46 (0)36 50001 • info@comfortsystem.se • www.comfortsystem.se