



Instruktioner för användare av Comfort Uppresningsstöd Quick-Up-stödet



Quick-Up-stödet uppfyller i tillämpliga delar, tillsammans med Comfort Sängsystem kraven enligt sängnorm EN 1970:1999 och skall brukas som handikapphjälpmedel, för hemsjukvård eller liknande. Quick-Up-stödet är avsedd för personer äldre än 12 år.





1. Bruksanvisning




Quick-Up-stödet skall EJ användas utanför sängens långsida!

1.1 Placering av Quick-Up stödet i brukarläge

- När stödet brukas skall det vara placerat i fästet på ett sådant sätt att det pekar aningen snett in mot sängens mittlinje. Det lilla stopp som finns på stödets rör skall ligga i fästets djupare urfräsning.



Kontrollera att Quick-Up-stödet är i rätt läge genom att försöka röra det åt sidorna!

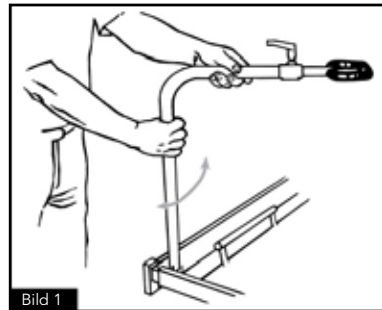


1.2 Justering i längd

- Stödet kan justeras i rätt längd genom att man lossar på vredet enligt **bild 2** och drar ut handtaget till önskad längd. OBS! Det finns ett inbyggt stopp som gör att handtaget inte kan dras ur helt och hållet!



1.3 När stödet ej används

• När stödet inte används kan det placeras parallellt med sängens fotgavel. Lyft lite lätt i Quick-Up-stödet och vrid det åt sidan enligt **bild 1**. Om stödet åter skall till brukarläge – vrid in det över sängen tills det tar stopp. Kontrollera återigen att Quick-Up-stödet är i rätt läge genom att försöka röra det åt sidorna!

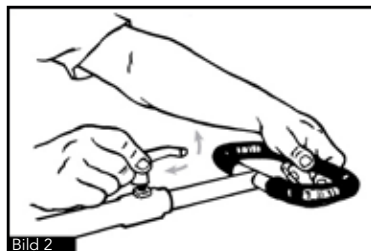

När Quick-Up-stödet används för förflyttning skall alltid minst två hjul på sänglyften vara låsta!

2. Skötselanvisning

Quick-Up-stödet kräver normalt inget löpande underhåll. Rengöring kan ske med fuktig trasa och normalt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel.

3. Användningsområde

Comfort uppresningsstöd, typ Quick-Up-stödet, får endast användas tillsammans med Comfort Sängsystem som hjälp vid förflyttning i säng eller vid förflyttning till/från säng.



Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet