

Sängvagnsinstruktioner Handling – från säng till vagn

Lås sängen

Kör upp sängen i en bra arbetshöjd

Häng på sängvagnen i huvudändan så att den passar med de inre hålen i gavelplåten, se till att fixeringsläppen på sängvagnen kommer in i profilen.

Lås hjulen uppåt mot sängvagnen

Lossa motorkablarna för rygg respektive fotfunktionen och se till att kablarna hänger fritt.

Lossa vreden helt de som sitter på sängens metall långsida och knäpp upp snäppfästena (två i fotändan och en i huvudändan) de som håller ihop sängbotten och sänglyft.

Lyft och dra bort fotdelen från sänglyften

Kör ner sänglyften i bottenläge och tippa upp ryggdelen på sängvagnen, lås sängvagnen innan du lyfter på fotdelen.

Lyft upp fotdelen på sängvagnen så att sängdelarnas metall sidor kommer emot varandra, dra ett spännband för att hålla ihop delarna

Alt.1 Lagg upp sänglyftens nedre del (där pedalerna för c-låset sitter) på u-bygeln på sängvagnen

Lyft nu upp sänglyften mot ryggdelen och lås fast den med spännbandet

Alt 2. Lyft upp sänglyften och lägg den horisontellt läge i u-byglarna och lås fast den med spännbandet.