



# Instruktion för användare av **ONYX-440** 440-3 Sänggram med höga grindar




Sängramen uppfyller kraven enligt sängnorm 60601-2-52  
Och är avsedd för personer som är äldre än 12 år.



## Leveransens omfattning


- 1 st Huvudgavel
- 1 st Fotgavel
- 2 st Överbommar (Trä)
- 4 st Underbommar (Aluminium)
- 1 st Skruvpåse

## 1 Montering Gavlar

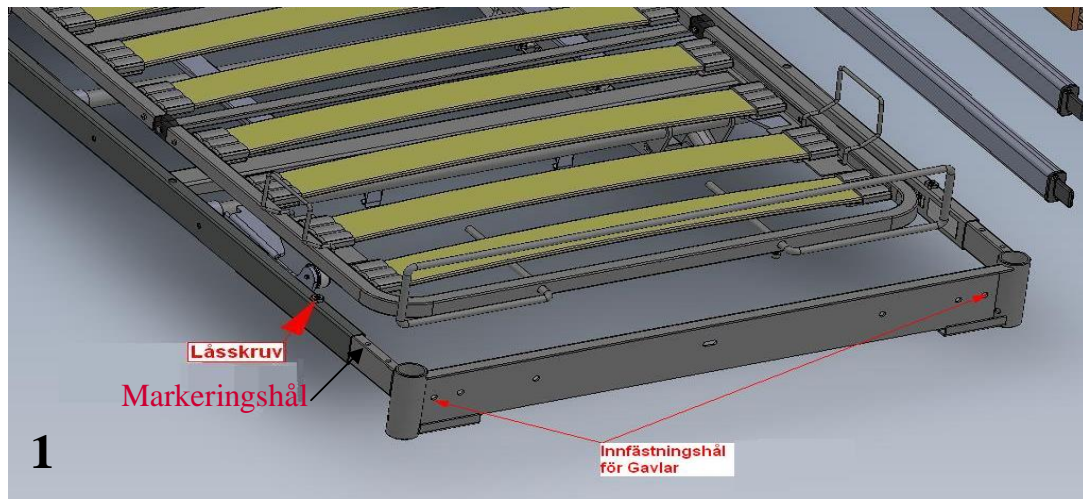


Montera ihop pinnbult och Möbelmuttrar, tryck in dessa från utsidan av gavlarna. Montera gavlarna på sängen (Skruvarna skall monteras genom dom yttre hålen i gavelplåten ) och drag åt muttrarna från insidan med lagom kraft.

**⚠ Varning för hårt dragna muttrar skadar skivan.**

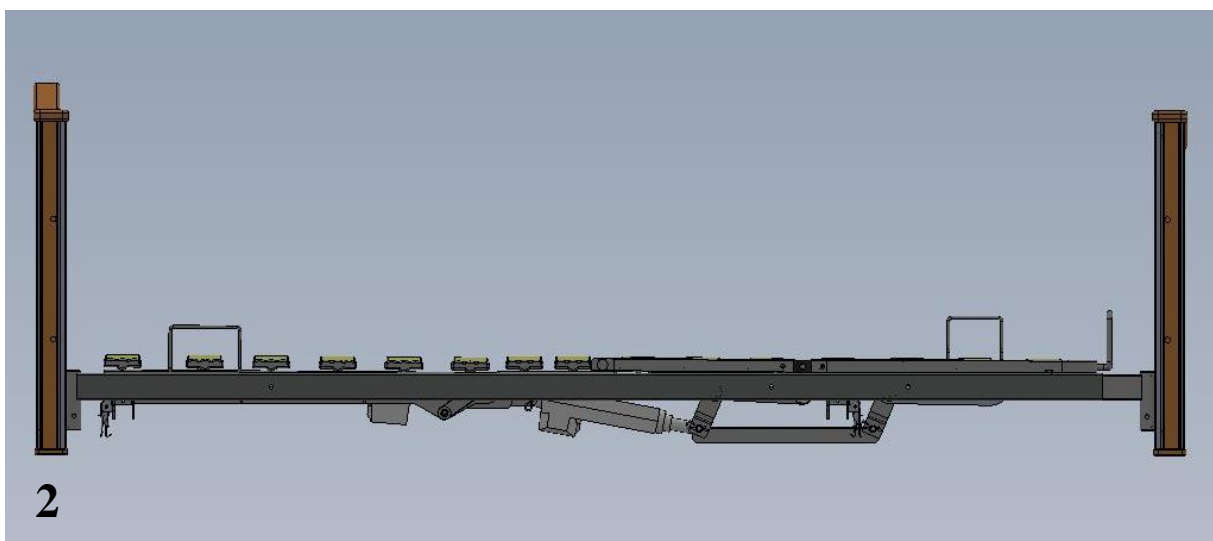

# Montering Grindar

Lossa dom 2 låsskruvarna som fixerar fotgavelplåten (se monteringsbild 1.), drag ut den ställbara fotändan till monteringsläge (ca 35mm).

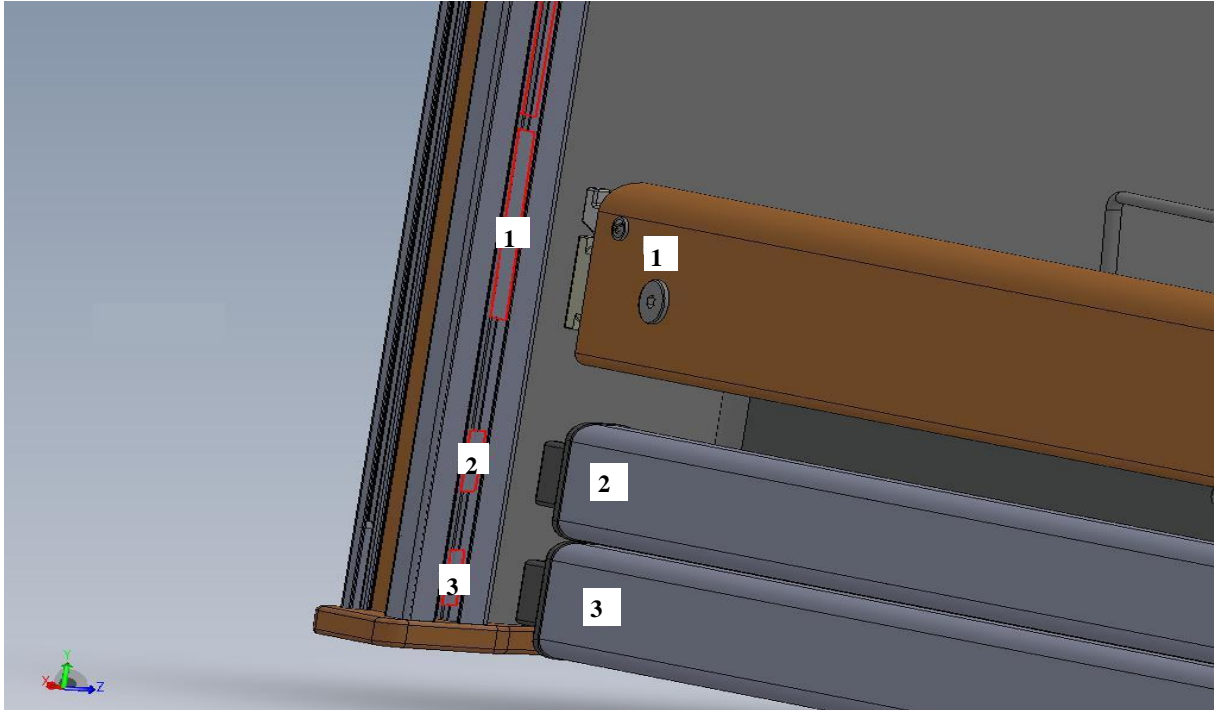

## Montera överbommar.

Greppa grindbommen med båda händerna, sätt pekfingrarna i fingergreppen och håll dessa indragna mot centrum. För in plastdetaljen i spår nr1, för sedan in plastdetaljen på samma sätt i motsvarande ända. Centrera bommen och släpp fingergreppen.

## Montera aluminiumbommar.

För in den vita plastdetaljen i spår nr 2, för sedan in plastdetaljen till hälften i motsvarande ända och centrera grindbommen. Var noggrann med centreringsen för att underlätta resterande montering.

Upprepa förloppet på samma sätt med samtliga aluminiumbommar.



Se till att sängen är i en bra arbetshöjd. Lyft lätt i fotgaveln och skjut in fotgaveln tills halva markeringshållet täcks av sängsidoprofilen (se bild nr 1).

Kontrollera att fixeringsläget är rätt, mellanrum bommar och gavlar skall måttet vara ca 3mm.

Drag åt Låsskruvarna med en insexnyckel på båda sidor, monteringen är klar.

# Bruksanvisning

## 1 Att använda grinden:

- △ Grindarna bör inte brukas av personer under 12år eller med en kroppsstorlek som understiger en vikt av 45kg och en längd av 150cm.  
Grindbommarna tjänar i lägsta läge som långsidor till sängramen.
  - Placera händerna med ca. en meters mellanrum med utgångspunkt från Sängens mitt
  - Lyft enbart i den övre grindbommen så högt det går.
  - Låsmekanismen låser grinden automatiskt i det översta läget.
- △ - Kontrollera att låsmekanismen fungerar, genom ett tryck med handen nedåt på den övre grindbommen.

## 2 Att fälla ner grinden

- I övre grindbommen finns två uttag ( höger och vänster ) för frigörning av låsmekanismen.
- Placera höger och vänster pekfinger i respektive uttag.
- △ - Kontrollera att den sängliggande inte har armar och ben mellan bommarna.
- Lyft grindbommen uppåt och dra därefter bägge låsmekanismerna Mot centrum.
- Sänk ner grinden. OBS! Du behöver ej hålla in låsmekanismen under hela Sänkningen av grinden.

## Madrasshöjder

**Sängram ONYX-440** I standardutförande, madrastjocklek 10-20 cm

**Sängram ONYX-440** Med tillbehör Grindförhöjare Bågen, klarar grindsystemet upp till 26cm madrass.

## Skötselanvisningar!!

Sängram med intergrerad grind kräver normalt ingen löpande skötsel.

ô Normal rengöring: Normalt förekommande rengörings-och desinfektionsmedel kan användas. Använd en fuktig trasa vid rengöring.

ô Om grinden känns trög:

Gavlarnas grindspår kan behöva smörjas för att gå lätt.

Litiumfett på sprayburk ( eller likvärdigt ) rekommenderas.