

HANDKONTROLL


Lampan för **ON** lyser gult om systemet är aktivt. Om systemet inte är aktivt är lampan släckt.

ON knapp: Aktivera systemet genom att trycka på knappen två gånger (varje tryck ca. en sekund).

ON knappen fungerar också som nöd knapp; detta kräver en lång knaptryckning, mer än två sekunder. Knappen används också för att återaktivera TIME OUT-funktionen.

SLEEP knapp: Tryck på **SLEEP** knappen två gånger för att sätta systemet i viloläge. Ska användas om du lämnar rummet innan systemet har gått i viloläge/stängts av.

SLEEP knappen fungerar även som NÖDSTOPP; detta kräver ett långt tryck på mer än två sekunder.

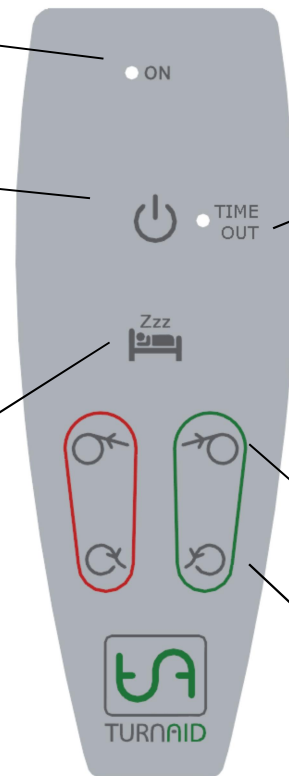

TIME OUT lampan blinkar när systemet inte har varit aktivt på 80 sekunder, systemet kommer även avge ett pip ljud. Du kan fortfarande använda rullarna.


För att fortsätta, kan systemet återaktiveras genom att trycka en gång på **ON** knappen. Om systemet inte återaktiveras, kommer lampan att lysa konstant efter 10 sekunder, och systemet kan inte användas innan det återaktiveras. I det fall du inte återaktiverar systemet kommer det stängas av helt efter 60 sekunder.

Knapp för användning av **röd** respektive **grön** motorrulle – drar/spänner draglakanet.

Knapp för användning av **röd** respektive **grön** motorrulle – lösgör draglakanet.

FOTKONTROLL

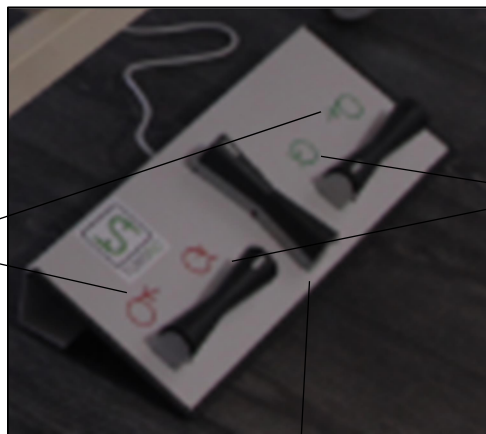


Knappar för **röd** och **grön** motorrulle, drar/spänner draglakanet. Yttersta vänster och yttersta höger knapp.



Knappar för **röd** och **grön** motorrulle, frigör draglakanet. Innersta vänster och innersta höger knapp.

ON knapp = Knappen i mitten på fotkontrollen.

BILDFÖRKLARING

Bild	Benämning	Beskrivning
	CE märke	Märket slår fast att systemet uppfyller gällande krav för CE märkning.
	Elektroniskt avfall	Symbolen indikerar att systemet vid kassering ska lämnas till närmaste återvinningsstation för återvinning enligt gällande regler och förordningar.
	Tätningssklass	Tätningssklass: IPX4 => Ej spolningstät och ej lämplig för bruk utomhus.

TURNAID – TRE POSITIONER

För steg-för-steg instruktioner – se kapitel 5 i brukarmanualen.

1: Användningsläge (under vändning)



2: Nedfällt läge (när systemet inte används)



3: Uppfälld sänggrind (under vändning)

