

Instruktion för användare av

# QLASSIC

## Sängbord

**QLASSIC**, det enkla smarta och stabila sängbordet med inbyggd serveringsskiva. Sängbordet kan enkelt anpassas till höger eller vänster sida av sängen. Två förvaringslådor samt skohylla. Enkelt att hålla rent.





## Innehållsförteckning -instruktion

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Introduktion        | 5. Bruksanvisning        |
| 2. Användningsområde   | 6. Skötselanvisning      |
| 3. Leveransomfattning  | 7. Teknisk specifikation |
| 4. Monteringsanvisning |                          |

### 1. Introduktion

Gratulerar till Ert val av QLASSIC Sängbord från ComfortSystem Scandinavia AB.

QLASSIC är ett sängbord med smart design som ger en mycket god funktion och samtidigt är lätt att hantera. Bordet har ett stilfullt utseende som stämmer väl in i de miljöer där brukare och skötare vistas.

För att garantera att produkten tillverkas med en jämn, hög kvalitet och med så lite miljöpåverkan som möjligt, är ComfortSystem Scandinavia AB certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

QLASSIC Sängbord tillverkas i Sverige enligt en strikt kvalitetsnorm. Varje sängbord testas med omsorg på fabrik före leverans.

Om produkten trots detta skulle visa sig vara behäftad med fel, var vänlig kontakta oss på ComfortSystem för åtgärd.

Kontakta oss gärna för support eller frågor gällande QLASSIC Sängbord.



## 2. Användningsområde

QLASSIC sängbord är konstruerat för att underlätta för brukare och vårdare i hemmiljö och vårdmiljö ex vis sjukhem, vårdhem, äldreboende eller liknande.

- Sängbordet är justerbart i höjd med ett enkelt handgrepp.
- Kan användas på höger eller vänster sida.
- Utdragbar serveringsskiva med stödskenor som motverkar avglidning.
- Finns med tillval vinklinsbar serveringsskiva.
- Kabinett med två lådor och skohylla.

För uppgift säkerhetslast och maximal belastning se teknisk specifikation!

Produkten skall endast användas i normal inomhusmiljö med temperaturer intervallet +10 till + 40 grader.

Produkten får endast kompletteras och användas tillsammans med tillbehör tillverkade/godkända av ComfortSystem Scandinavia AB .


Produkten får endast användas för avsett användningsområde.

Om Sängbordets funktioner ändrar sig eller upphör att fungera, kontrollera bordet enligt anvisningar för underhåll och tillsyn.

Kvarstår efter detta problem kontakta ComfortSystem för support.



ComfortSystem Scandinavia AB  
Frånsäger sig produktansvaret  
om produkten förändras,  
monteras eller används på annat sätt än  
vad som framgår av denna instruktion

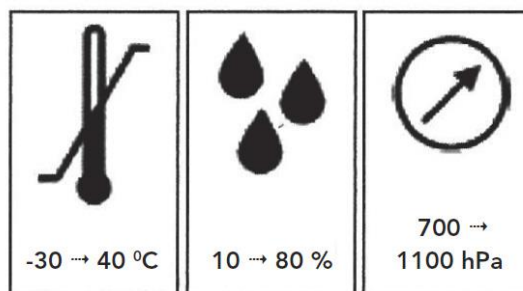

### 3. Leveransomfattning

#### 3.1 Uppackning

När förpackningen öppnas skall den stå på högkant med märketiketten uppåt.

Öppna förpackningen i sidan och rulla ut bordet. Kontrollera att innehållet i förpackningen stämmer.

#### 3.2 Innehåll

QLASSIC Sängbord

Instruktion för användare av QLASSIC Sängbord

Sängbordet är färdigmonterat i förpackningen, inga lösa delar är bifogade.

### 4. Monteringsanvisning

#### 4.1 Anpassning höger eller vänster sida.



Tag ett stadigt tag med båda händerna och lyft av lådhurtsen.



Skruva bort de två skruvarna som håller hakbeslaget.



Skruva tillbaks beslaget på hurtsens motsatta sida. Häng tillbaks lådhurtsen på sängbordet.

## 5. Bruksanvisning

### 5.1 Höjdinställning av QCLASSIC



**Vid justering av höjd,**  
stå placerad enl. bild.

Tag ett stadigt tag om bordsskivan med båda händerna, håll samtidigt in låsspaken med högerhanden.

När denna spak hålls intryckt är bordet fritt att höja och sänka.

För att höja bordet, lyft till önskat läge och släpp låsspaken.

För att sänka, tryck ner skivan till önskat läge och släpp låsspaken.

### 5.2 Bruk av serveringskiva



**Utdragbar serveringskiva.**  
Greppa den vita listen och drag ut skivan tills skivan når sitt yttre låsläge.



**Återställning av serveringskiva.**  
Greppa den vita listen och tryck in serveringskivan tills den når sitt inre låsläge.



### 5.3 Bromsar

QLASSIC sängbord är utrustat med bromspedal på varje hjul.

Vid bruk av sängbordet över säng, räcker det att låsa dom två yttre hjulen.



Samtliga bromsar skall vara låsta när bordet står parkerat vid sidan av sängen eller på annan plats.

Med låsta bromsar står bordet stadigt.



I annat fall föreligger risk att brukaren eller någon annan tar stöd av sängbordet. Med olåsta bromsar kan detta utgöra olycksrisk.

### 5.4 Tillval: Serverings-skiva vinklingsbar

Skivan är vinklingsbar i olika lägen och ger ett bra stöd för boken, tidningen eller till och med Läsplattan.



Lyft skivan till önskat läge, se till att stödbågen låser i hakbeslaget som finns under skivan.



Att byta sida, lyft upp skivan och haka av den, rotera skivan ett halvt varv och haka fast den på motsatt sida.



## 6 Skötsel­anvisning

### 6.1 Underhåll

QLASSIC är en produkt som normalt kräver minimal skötsel. Beroende på miljö och flitigt användande kan visst underhåll krävas.

### 6.2 Rengörning

Sängbordet rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengöringsmedel och desinfektionsmedel kan användas.

QLASSIC får ej utsättas för spolning eller rengöras i tvättanläggning.

## 7 Teknisk specifikation

- Vikt:	Komplett sängbord	30 kg
- Max-belastning:	serveringskiva	12 kg
- Höjd:	steglöst inställbar	75-99 cm
- Serveringskiva:	(L x B)	50x44 cm
- Bordsskiva:	(L x B)	62x45 cm
- Ytskikt bord och serveringskiva		högtryckslaminat
- Kabinett		laminerad MDF
- Stativ och skohylla		pulverlackerad plåt.

## Felsökning

**Sängbordet är trögt att höja och sänka.**

Kontrollera gaskolvens funktion.



## Vår erfarenhet - din trygghet

ComfortSystem har sedan 1987 haft i stort sett samma ägandestruktur och verkat under samma namn, ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att Du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



**ComfortSystem**  
- för trygg omvårdnad

ComfortSystem Scandinavia AB \* Vistakullevägen 18 \* 561 46 HUSKVARNA \* Sweden  
Tfn +46 (0)36 51590 \* Fax +46 (0)36 50001 \* info@comfortsystem.se \* [www.comfortsystem.se](http://www.comfortsystem.se)