



- 1.** Placera Sängryggstödet centrerat i sängens huvudända enligt **bild 1**.
Montera spännbanden genom Sängryggstödet fixeringsöglor enligt **bild 2**.



- 2.** Drag spännremmarna runt om sängens undersida, se till att spännanordningen på remmarna hamnar på sidan av sängen enligt **bild 1**. Koppla samman remmarna med spännlåsen och drag åt dessa hårt



- 3.** Sängryggstödet regleras från handkontrollens två knappar.
Upp ⬆ och Ner ⬇



- 4. Stöd och vändhandtag (A)**
Underlättar vändning i säng och ger ett bra stöd vid uppresning.
Sittlås (B)
Förhindrar att Sängryggstödet åker högre upp i säng och förbättrar låsning av Sängryggstödet i sidled.



- 5.** Se vår instruktionsfilm på www.comfortsystem.se




Avser endast sängryggstöd med sidoplacerad motor



1. Placera Comfortabel sängryggstöd på högkant med motorpaket uppåt enligt bild ovan.



2. Skruva bort ratten för att lossa det L-formade fästet med motorn.

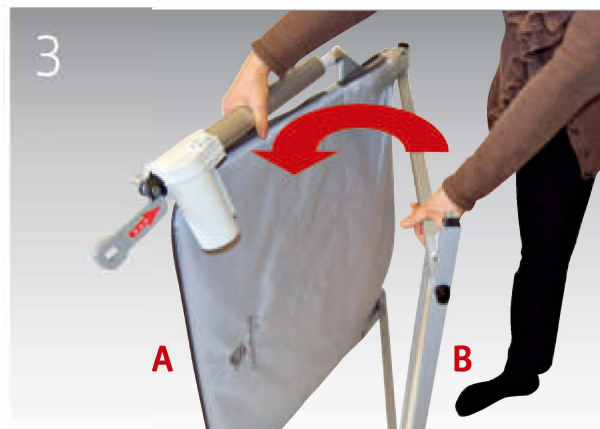

3. Håll ett stadigt tag med ena handen om motorn och delen med ryggtyg (A). Vrid runt delen utan ryggtyg (B) 360° till den möter delen med ryggtyg på nytt.



4. Vrid över motorpaketet ett halvt varv så att pilen på det L-formade beslaget pekar mot den undre delen av ryggstödet enligt bild ovan.



5. Sätt tillbaka det L-formade fästet med bricka och skruva åt ratten.

OBS! Säkerställ att det L-formade beslaget med röd pil pekar ner mot golvet vid montering på säng.



MADE IN SWEDEN