

FloorBed[®]
by Accora



FloorBed 2 Grindar

IFU-FL2-003SV REV 01

Accora

Innehåll

Rubrik	Sida
Välkommen	2
Allmänna varningar	3
1. Leveranssätt	3
2. Säkerhetsanvisningar	3
3. Avsedd användning	3
4. Teknisk specifikation	4
5. Tillbehör och reservdelar	4
6. Montering och ditsättning	4
7. Användning av sidoräcken	8
8. Funktionskontroll	10
9. Rengöring och desinfektion	10
10. Felsökning	10
11. Förvaring	10
12. Garanti	11
13. Avfallshantering	11
14. Daglig inspektion	11
15. Allmänt underhåll	11
16. Symboltabell	11
17. Kontaktuppgifter	11

Translated from IFU-FL2-003EN Rev 03

FloorBed 1 Sidoräcken är klassificerade som en klass 1 medicinsk enhet i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.



Meddelande till användaren

Om en allvarlig incident inträffar i samband med denna medicintekniska produkt, som påverkar användaren eller patienten, bör användaren eller patienten rapportera den allvarliga incidenten till tillverkaren (eller distributören av den medicintekniska produkten) och, i Europeiska unionen, bör användaren också rapportera den allvarliga incidenten till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna.



Accora Ltd, 38 Main Street
Swords, Co. Dublin, Irland, K67 E0A2
Tel: +353 (0)1 695 0614

Välkommen

Bästa kund,

Tack för att du köper en Accora sjukvårdsprodukt. Innan du använder sängen måste du läsa och förstå alla instruktioner i denna bruksanvisning. Alla åtgärder och hantering av sängen måste utföras i enlighet med instruktionerna i denna handbok.

Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för användare och operatörer under hela sängens livslängd.

Om du behöver mer information, vänligen kontakta oss. Se avsnitt 17 för regionspecifika kontaktuppgifter.

Denna bruksanvisning gäller för FloorBed 2 Siderails.

FloorBed 2 Siderails är utformade för att användas av patienter som har en FloorBed 2.

Innan du använder detta tillbehör måste du läsa och till fullo förstå denna bruksanvisning. Alla åtgärder och hantering av FloorBed 2 Siderails måste utföras i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

Eventuella åtgärder som är oförenliga med manualen utförs på egen risk och Accora ansvarar inte för skador. Se till att denna bruksanvisning är tillgänglig för användare, vårdare, operatörer och patienter under hela FloorBed 2 Siderails livslängd.

FloorBed 2 Siderails bör kontrolleras regelbundet av användaren, vårdgivaren, operatören eller patienten för att säkerställa att installationen är korrekt och fungerar som avsett.

Designpolicy och upphovsrätt

® And TM är varumärken som tillhör Accora Ltd om inte annat anges. Eftersom vår policy är under kontinuerlig förbättring förbehåller vi oss rätten att ändra design utan föregående meddelande. © Accora Ltd 2020.

ALLMÄNNA VARNINGAR

1. Förvara den här bruksanvisningen för framtida referens.
2. Dessa instruktioner måste följas för att säkerställa säker och effektiv användning av FloorBed 2 Siderails och säkerheten för användare och vårdare.
3. FloorBed 2 Siderails måste monteras, placeras och användas i enlighet med dessa instruktioner.
4. FloorBed 2 Siderails får inte utsättas för rök, öppen låga, extrem temperatur, brandfarliga gaser eller andra farliga ämnen eller situationer.
5. Accora ska inte hållas ansvarig för skador, personskador eller olyckor som uppstår till följd av obehöriga modifieringar, icke-äkta reservdelar, vårdslöshet eller användning som strider mot denna handbok och som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
6. Använd endast sidoräcken och andra tillbehör som är kompatibla med denna säng som levereras av Accora. Inkompatibla sidoräcken kan skapa faror.
7. Håll barn och husdjur borta från denna säng om de inte övervakas av en vuxen, eftersom det finns risk för skada och/eller kvävning av de små delarna.
8. Vid dragning av kablar för annan elektronisk utrustning som används med sängen (t.ex. luftmadrasspump), se till att kablarna inte kan klämmas, krossas eller skadas av de rörliga delarna på sängen.
9. Sitt, stå eller häng aldrig på sidoräckena.
10. Montering och installation MÅSTE utföras av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.
11. Modifiera inte FloorBed 2 Siderails.
12. Patienter, eller användare, bör riskbedömas för att säkerställa att de kan förstå denna bruksanvisning och använda FloorBed 2 Siderails på ett säkert sätt utan risk för sig själva eller andra.
13. Om madrassens och tillbehörens sammanlagda vikt överstiger 35 kg måste den maximala patientvikten minskas i enlighet med detta.
14. Fäst inget på sidoräcket, t.ex. luftpumpen till madrassen.
15. Montera inte sidoräcken när en användare ligger i sängen. Användaren måste föras ut ur sängen innan sidoräckena sätts dit.
16. Sidoräcken får inte användas för fasthållning av en patient. Patienterna ska riskbedömas av en kvalificerad läkare.
17. Om en specialmadrass eller madrassöverdrag används och avståndet från ovansidan av den okomprimerade madrassen till ovansidan av sidoräcket, om sådant finns, är mindre än 220 mm/8,7 tum, skall en riskbedömning utföras för att garantera likvärdig säkerhet.

1. Leveranssätt

FloorBed 2 Siderails levereras isärmonterade.

Stänger, konsoler och tyg kräver montering och installation på en FloorBed 2 vårdsäng.

Kontroll ska ske vid mottagandet för att säkerställa att leveransen är komplett och oskadad.

Alla saknade delar, fel eller skador måste omedelbart rapporteras till transportören, och Accora, skriftligen.

Vid flytt av FloorBed 2 Siderails, lastning eller lossning måste försiktighet iakttas så att inga delar går förlorade eller skadas.

2. Säkerhetsinstruktioner

1. Montering och installation MÅSTE utföras av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.
2. Innan du använder FloorBed 2 Siderails måste du läsa denna bruksanvisning och använda denna enhet i enlighet med den.
3. FloorBed 2 Siderails FÅR inte användas om fel har upptäckts som kan skada patienten, personalen eller en tredje person, eller skada FloorBed 2, FloorBed 2 Siderails eller omgivningen.
4. Innan du använder FloorBed 2 Siderails MÅSTE operatören förstå sidoräckena och deras funktionalitet.
5. FloorBed 2 Siderails får aldrig överbelastas.
6. Vid manövrering av FloorBed 2 Siderails eller andra rörliga delar måste man se till att patienten, andra personer eller föremål inte fastnar.
7. Vid reparation av FloorBed 2 Siderails får endast originalmaterial och komponenter som tillhandahålls av Accora användas.
8. FloorBed 2 Siderails bör inspekteras dagligen.
9. FloorBed 2 Siderails ska endast monteras efter en klinisk bedömning av användaren eller patienten.

3. Avsedd användning

FloorBed 2 Siderails får endast användas med FloorBed 2 och FloorBed 2 Junior.

Med förbehåll för en riskbedömning kan sidoräcken bidra till att skapa en säkrare miljö för sänganvändaren.

4. Teknisk specifikation

Miljöinformation:

Förhållande	Temperaturintervall	Relativ luftfuktighet	Atmosfärstryck
Drift	+10 °C till +40 °C +50 °F till +104 °F	30 % till 75 % (Icke kondenserande)	700 hPa till 1 060 hPa
Transporter/ lagringsutrymme	-20 °C till +50 °C -4 °F till +122 °F		

Om FloorBed 2 Siderails förvaras under förhållanden utanför det normala driftsområdet bör de ges tid att stabiliseras under normala driftsförhållanden före användning.

Beskrivning	Värde
Yttre mått	2 000 L x 500 H x 50 B mm (Standardversion) 2 200 L x 500 H x 50 B mm (Utökad version)
Maximal tillåten belastning för FloorBed 2 Siderails	75 kg
Material	PU-tyg och mjukt stål
Totala vikten för kitet med sidoräcken	16,8 kg
Förväntad livslängd	5 år

FloorBed 2 Siderails finns i två längder och levereras som ett kit bestående av två/tre artiklar.

Antal/beskrivning	Satsen innehåller
SDR-0-FL2-100 2000mm Standardsats sidoräcken Lämplig för vuxna patienter över 146 cm	SDRBR-0-FL2-200 + FABKIT-0-CB1-000 ELLER SDRBR-0-FL2-200 + SDRFAB-0-FL1-100 + SDRMET-0-FL1-100
SDREX-0-FL2-100 2 200 mm förlängningssats för sidoräcken Lämplig för vuxna patienter över 146 cm	SDRBR-0-FL2-200 + FABEXKIT-0-CB1-000 ELLER SDRBR-0-FL2-200 + SDRFABEX-0-FL1-100 + SDRMETEX-0-FL1-100
SDR-0-FL4-500 2 000 mm Sats med sidoräcken av standardmodell med fäste Lämplig för barn mellan 75 cm och 155 cm, endast när den är monterad på FloorBed 2 Junior: NSB-0-FL2-200 + Bumpers för huvud- och fotgavel BMHNE-0-FL4-500 + Säkerhetshylsa SLE-0-FL4-100 + Skyddsplatta PROPL-0-FL4-500	SDRBR-0-FL4-500 + FABKIT-0-FL4-000 ELLER SDRBR-0-FL4-500 + SDRFAB-0-FL4-100 + SDRMET-0-FL1-100

5. Tillbehör och reservdelar

Beskrivning	Beställningskod
Madrassfyllning för FloorBed	MTINF-0-FL1-000
Set med monteringskonsol för sidoräcken (passar 2 000 och 2 200 mm)	SDRBR-0-FL2-200 +
Set med monteringskonsol för sidoräcken med stoppning	SDRBR-0-FL4-500
2 000 mm tyg och stång-kit	FABKIT-0-CB1-000
2 200 mm tyg och stång-kit	FABEXKIT-0-CB1-000
2 000 mm tyg med stoppning och stång-kit	FABKIT-0-FL4-000
2 000 mm tygkit	SDRFAB-0-FL1-100
2 200 mm tygkit	SDRFABEX-0-FL1-100
2 000 mm tygkit med stoppning	SDRFAB-0-FL4-100
2 000 mm stång-kit	SDRMET-0-FL1-100
2 200 mm stång-kit	SDRMETEX-0-FL1-100
Fixeringssats för konsol till sidoräcken	SDRKIT1-0-FL1-000
Tygfixeringssats för sidoräcken	SDRKIT2-0-FL1-000
Dragrem för sidoräcken	SDRPLST-0-FL1-000

6. Montering och anpassning

VARNING

Montering MÅSTE utföras av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.

Alla funktioner MÅSTE testas och godkännas efter montering av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.










Monteringen MÅSTE ske på ett rent, städat område och barn och husdjur bör hållas borta.

Montera inte sidoräcken när en användare ligger i sängen. Användaren måste föras ut ur sängen innan sidoräckena sätts dit.


Om en specialmadrass eller madrassöverdrag används och avståndet från ovansidan av den okomprimerade madrassen till ovansidan av sidoräcket, om sådant finns, är mindre än 220 mm/8,7 tum, skall en riskbedömning utföras för att garantera likvärdig säkerhet.

- Kontrollera om synliga skador har uppstått på bädden under transporten och att leveransen är klar.
- Du behöver följande verktyg för att montera och passa in FloorBed 2 Siderails:
 - 4 mm insexnyckel
 - 5 mm insexnyckel

3. Identifiera alla komponenter:

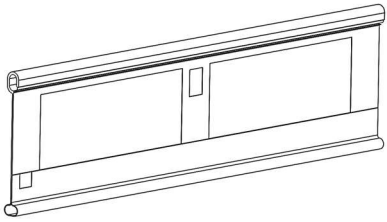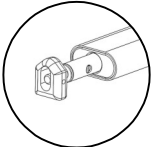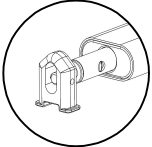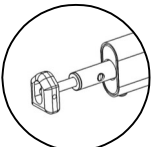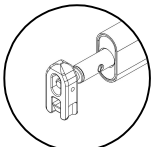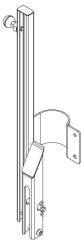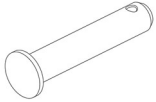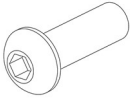
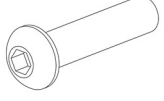
Tygöverdrag Kvantitet 2	
Bottenfält Kvantitet 2 Det finns två typer av block. Samtliga visas i denna bruksanvisning	  Gammal typ Ny typ 
Övre stång Kvantitet 2 Det finns två typer av block. Samtliga visas i denna bruksanvisning	  Gammal typ Ny typ 
Konsol för sidoräcke Mängd 4	
Lyfthandtag Mängd 4	
R-klämma Mängd 4	
Stift (50 mm) Mängd 4	
Bottenstångens fästskruv (25 mm) Mängd 4	
Fästskruv för konsol (35 mm) Mängd 4	

Obs! - I denna bruksanvisning beskrivs sängens vänstra och högra sida ur synvinkel från en patient som ligger i sängen.


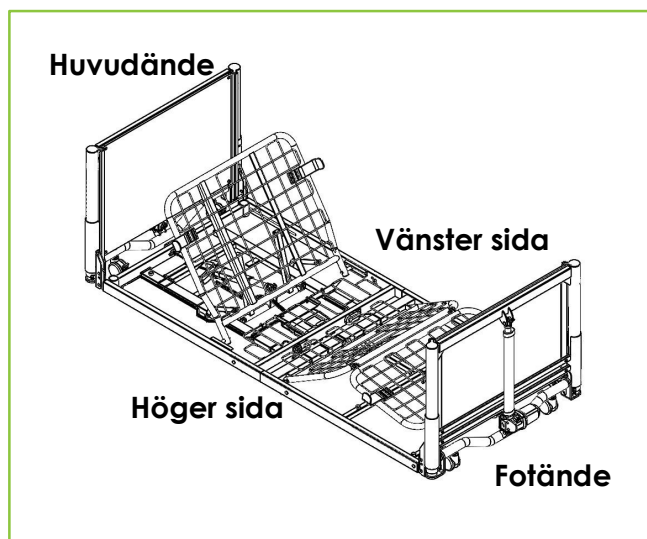


Obs! - Följande instruktioner beskriver montering av en konsol för sidoräcke på vänster sida av sängen vid huvudändan.

4. Ta bort sidoräckets fästskruvar och brickor från tvärstången med en 4 mm insexnyckel och behåll för återanvändning.

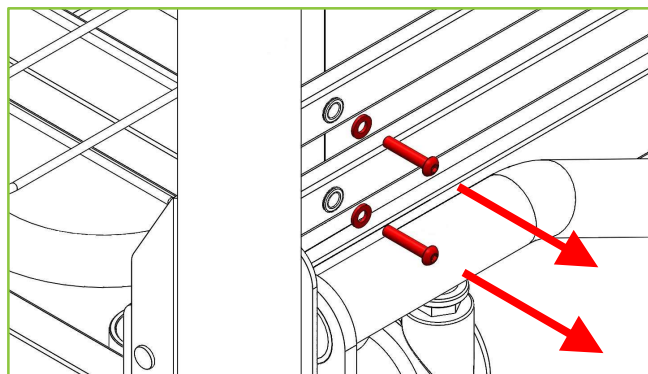
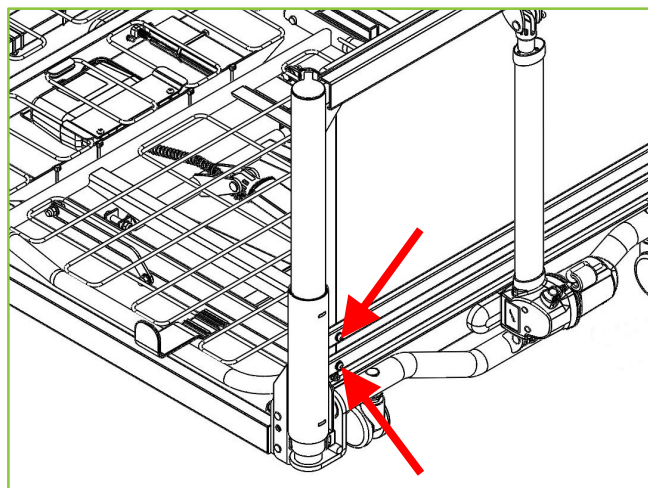


5. Ta bort madrassplattformens låssprint och R-klämman.

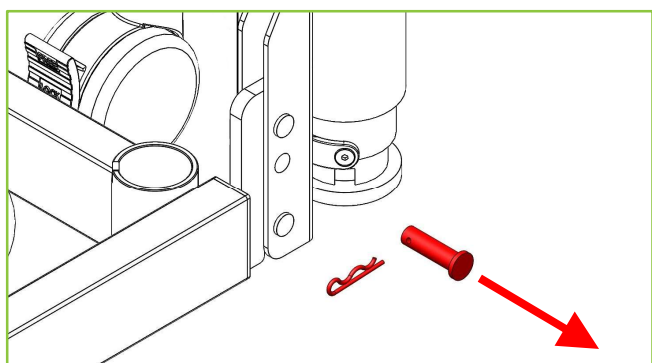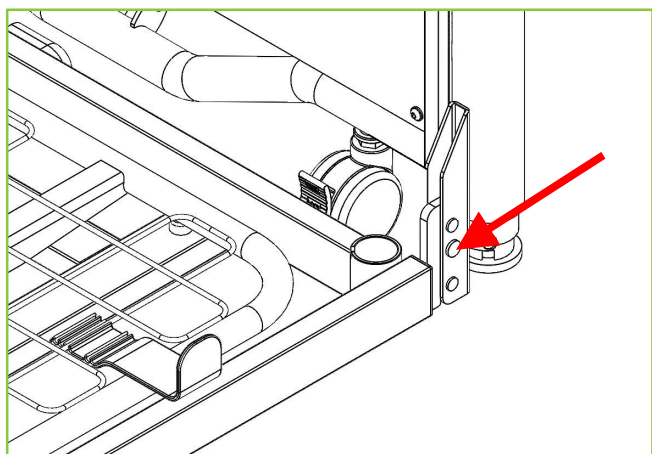


Obs! – Denna stift kommer inte att behövas för att passa in sidoräckena. Förvaras säkert för användning om sidoräckena tas bort.



6. Ta bort de två skruvarna med låssprint och R-klämmor från konsolen till sidoräcket.
7. Sätt dit konsolen uppifrån och skjut den nedåt på plats.

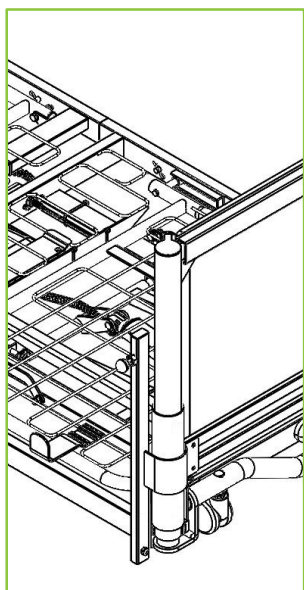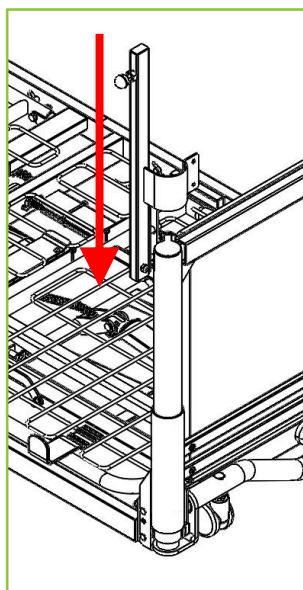


8. Passa in hålet för sidoräckets låssprint och hålet för madrassplattformens låssprint.

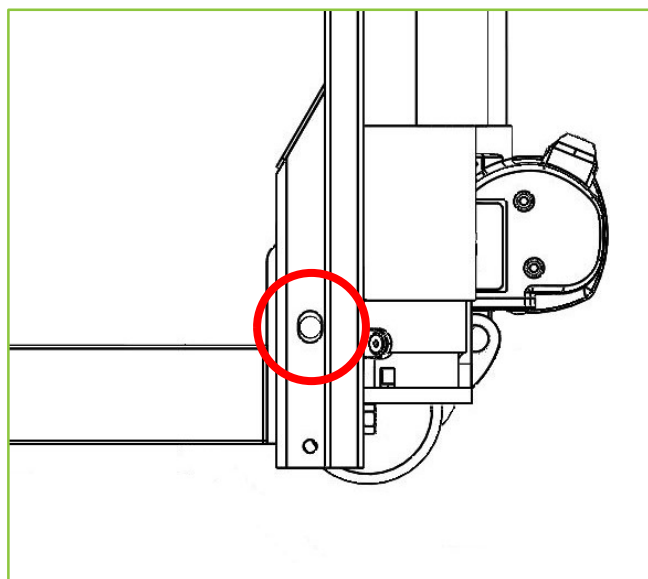


9. Sätt dit låssprinten och R-klämman. (50 mm lång, medföljer sidoräckena).

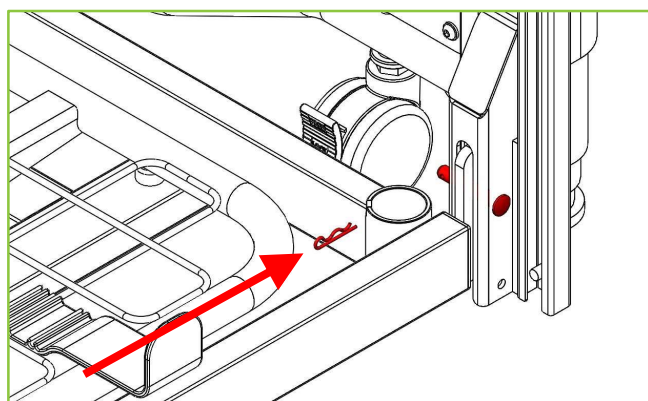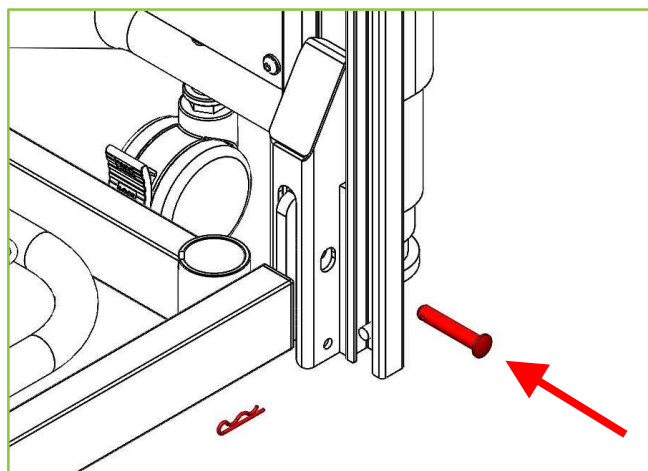


10. Montera fästskruven (35 mm lång) med en 5 mm insexnyckel.

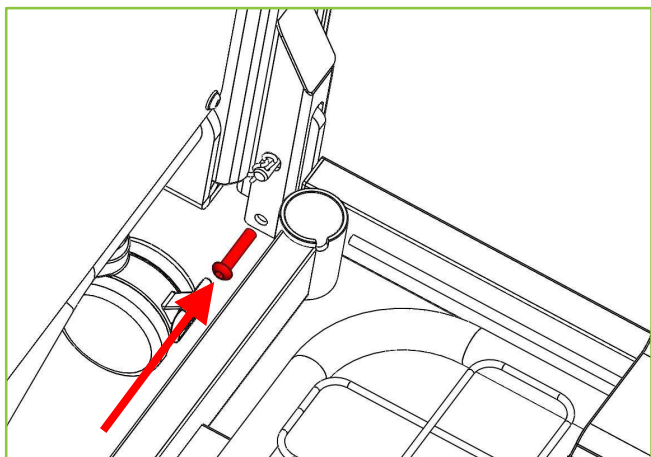

11. Rikta in hålen i den böjda delen av konsolen med hålen i tvärstängen.

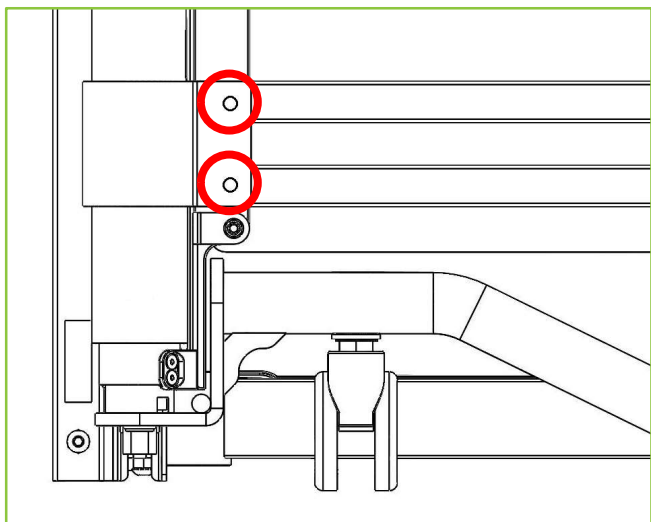


12. Fäst den böjda delen av konsolen till tvärstäng med en 4 mm insexnyckel och skruvarna och brickorna som togs bort i steg 4

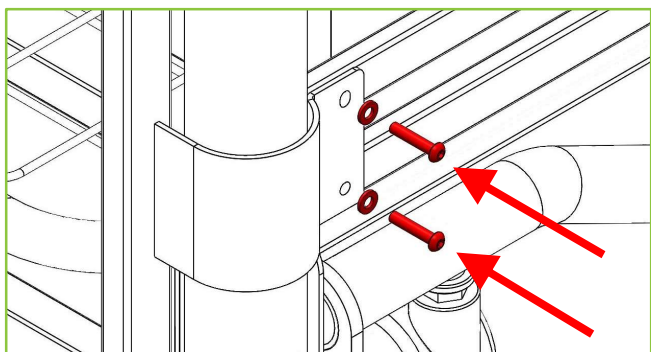

13. Denna konsol är nu på plats. Upprepa ovanstående process för att montera en konsol för sidoräcke på den högra sidan av sängen vid fotänden.


14. Ta ut ett av sidoräckets tygöverdrag från förpackningen och sprid ut det på en plan yta med etiketterna uppåt. ("Topp och utsida"-etikett vänd uppåt.)
15. Öppna blixtlåset på den övre fliken på tygöverdraget och sätt i övre stängan.

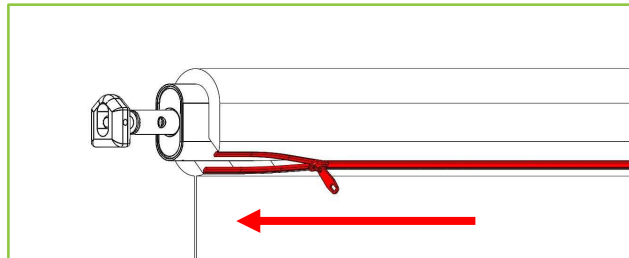

Obs! – de övre och nedre stängarna är olika och kan identifieras enligt punkt 3 i avsnitt 6.

16. För in den nedre stängan genom spåret längst ner på tygöverdraget.

17. Sätt dit lyfthandtagen i båda ändarna av den övre stängan. Mata remmarna genom spåren i ovansidan av tygöverdraget.

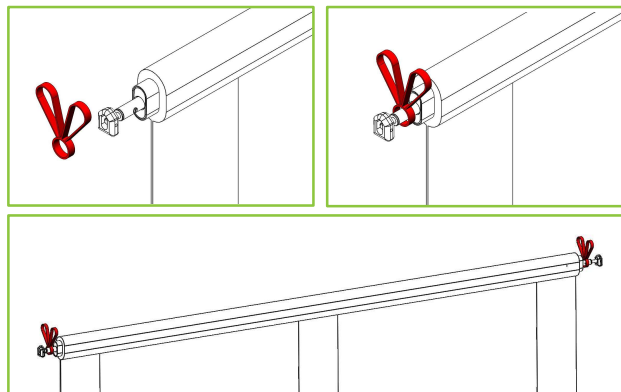


18. Höj golvbädden minst 20 cm från marken med hjälp av handenheten.


19. För in den övre stängan upp i glidskenans botten i båda ändarna av sidoräcket.

Obs! – "Topp och utsida"-etiketten MÅSTE vara på toppen och utsidan, dvs. vänd bort från sängen. Det integrerade stöd på SDR-0-FL4-500 ska sitta på insidan av bädden.

Obs! – orientering av övre stång enligt nedan med den vinklade änden av glidblocket uppåt.

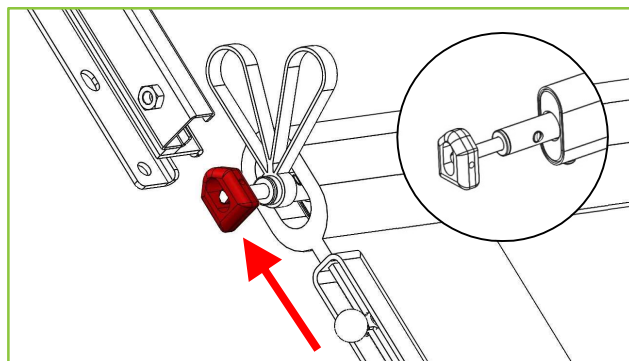


20. **Viktigt!** Se till att ALLA plaststyrningar är monterade i glidskenan. (fyra plaststyrningar i varje ände av sidosäckstyget.)

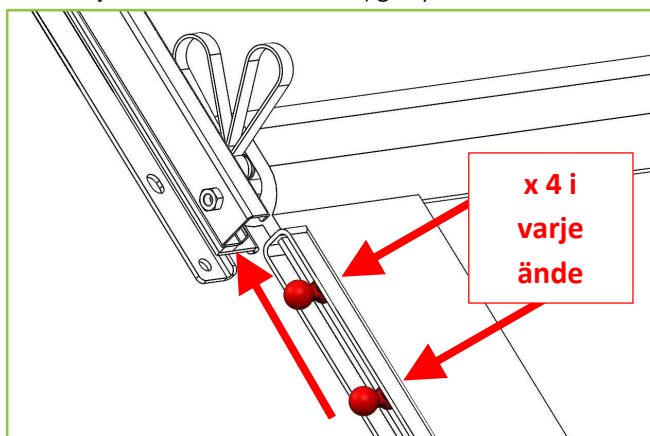

Obs! – Siderail SDR-0-FL4-500 har en extra låskolv i stödets botten. Dra ut kolven för att flytta stängerna upp för glidbanan.


21. För in den nedre stängan i glidskenan i båda ändarna av sidoskenan.

Obs! – orientering av övre stång enligt nedan med den vinklade änden av glidblocket uppåt.

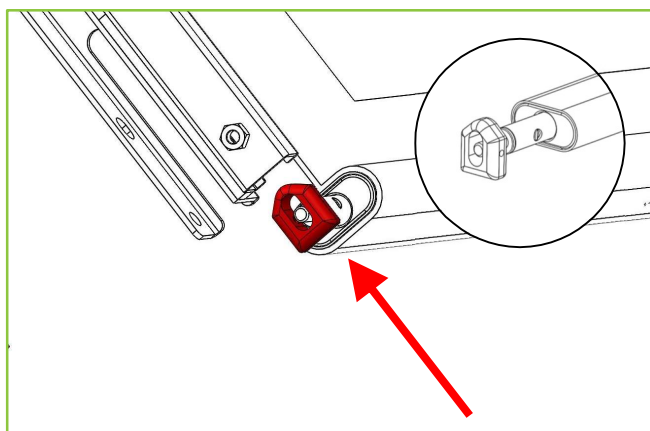


22. Montera bottenstångens fästskruv (25 mm lång) med en 5 mm insexnyckel.

Obs! – Bottenstångens fästskruv (25 mm lång) MÅSTE monteras i glidblocket för att säkra att bottenstången hålls på plats.

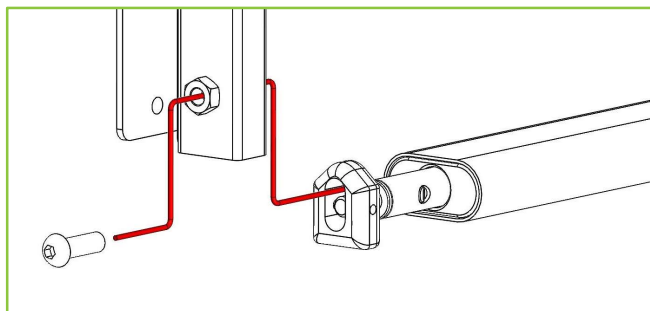


Obs! – när den nedre fästskruven har monterats, se till att den nedre stängan inte kan röra sig upp eller ner.

23. Sidoräcket är nu monterat på ena sidan av sängen.

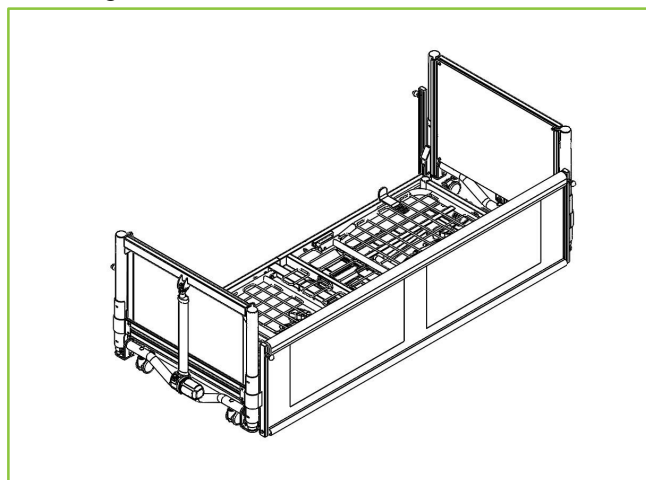

24. Upprepa processen för montering av sidoräcket på andra sidan av bädden.

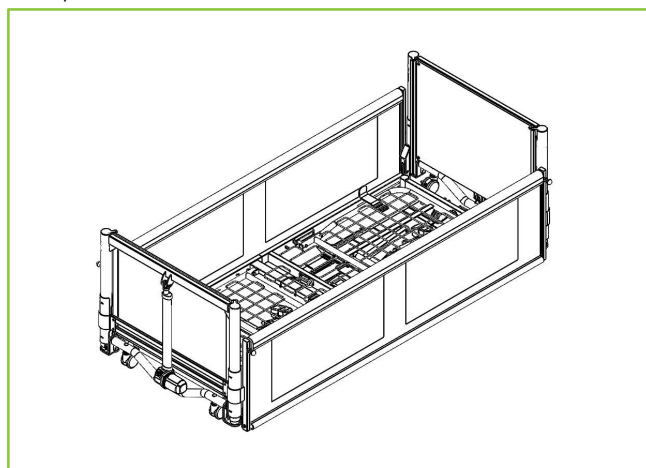

7. Användning av sidoräckena

VARNING

Patienter, eller användare, bör riskbedömas för att säkerställa att de kan förstå denna bruksanvisning och använda FloorBed 2 Siderails på ett säkert sätt utan risk för sig själva eller andra.

Sidoräcket måste alltid vara i uppläge när patienten eller användaren är ensam, eller utan uppsikt, om inte en klinisk utvärdering har utförts och indikerar något annat.


Sitt, stå eller häng aldrig på sidoräckena.

Fäst inget på sidoräcket, t.ex. luftpumpen till madrassen.

Obs! Om det rekommenderas av en patientriskbedömning, kan FloorBed-madrassfyllningsdelar användas när sidoräcken är monterade (utom SDR-0-FL4-500 där fodret är en del av sidoräcket). Sidoräcken måste höjas och sänkas en ände, eller ett hörn, av sängen åt gången.


För att höja sidoräcket:

1. Använd lyfthandtaget för att lyfta sidoräcket. Om SDR-0-FL4-500 är monterad, dra ut den nedre kolven först för att frigöra den övre stängen.

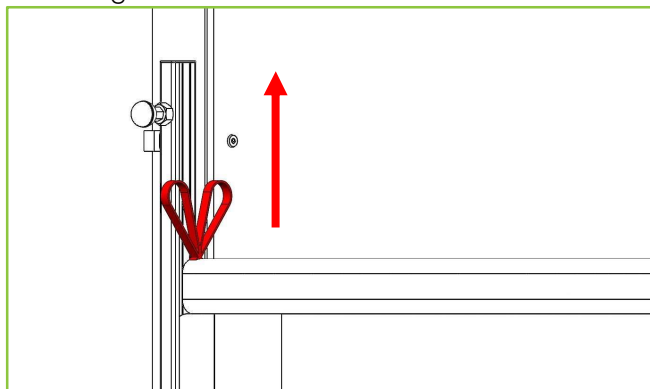


2. Fäst den övre stängen på plats med låskolven. (Du kanske vill dra tillbaka kolven, höja sidoräcket och sedan släppa kolven för att låsa sidoräcket i upphöjt läge)

1. Dra tillbaka låskolven
2. Att höja sidoräcket
3. Lossa låskolven

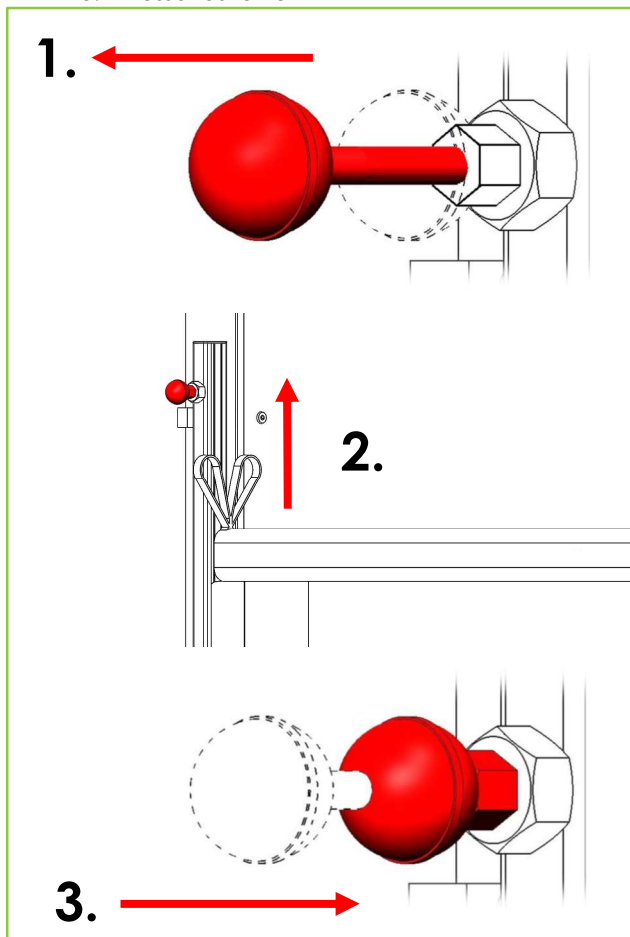


3. Se till att sidoräcket är ordentligt upphöjt och låst genom att trycka ner försiktigt.

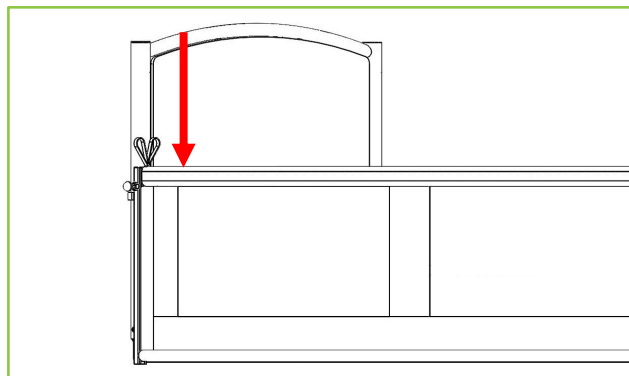


Så här sänker du sidoräcket:


1. Dra lyfthandtaget ordentligt uppåt.

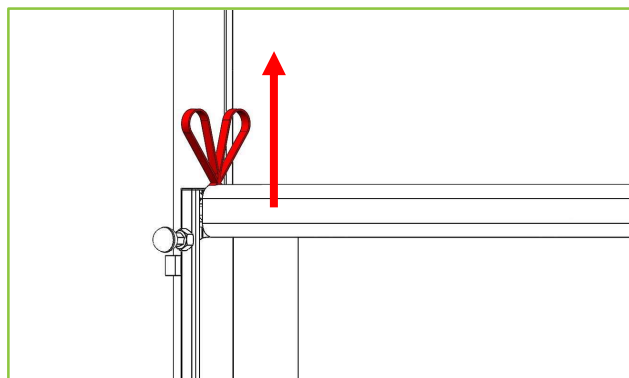


2. Dra tillbaka låskolven

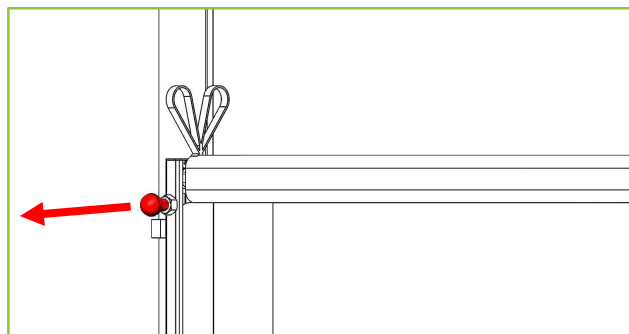

3. Sänk sidoräcket.

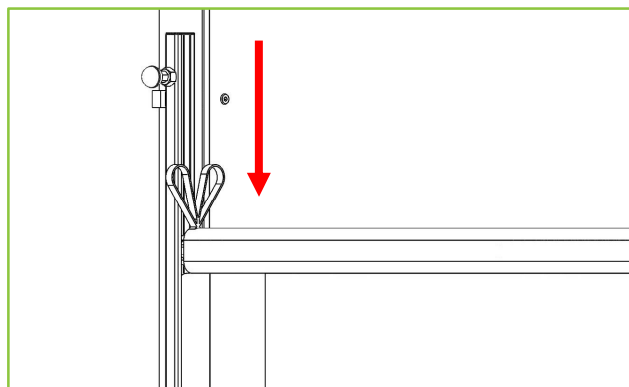

4. Se till att sidoräcket är helt nere och att den övre stängan är under madrassens ovansida i båda ändar. Om SDR-0-FL4-500 är monterad, se till att den övre stängan är korrekt placerad vid den nedre kolven. Du kan behöva dra ut kolven och sedan trycka ner sidoräckets stång in i kolven.

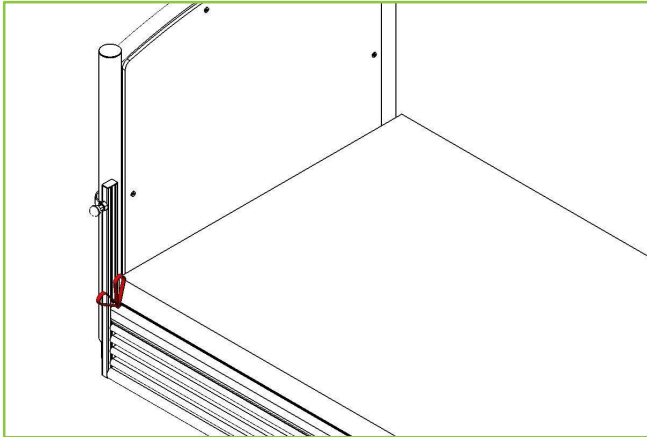

8. Funktionskontroll

VARNING

Alla funktioner **MÅSTE** testas och godkännas efter montering av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.

Lyft upp FloorBed Siderails med hjälp av Lyftthandtaget och säkra de övre stängerna på plats med hjälp av låskolvorna i varje hörn av sängen.

Kontrollera följande:

1. Fungerar FloorBed 2 Siderail enligt sitt avsedda syfte utan oväntat buller eller rörelse?
2. Finns det några hål eller revor i tyget, lösa eller trasiga trådar eller sömmar?
3. Är alla fixturer och beslag täta och säkra?
4. Verkar ramen för FloorBed 2 Siderail stabil och säker?
5. Är alla elledningar (inklusive tillbehör, t.ex. madrassluftpump) säkrade och dragna för att förhindra skador?
6. Är alla plastglidskenor monterade i skenan för sidoräcket?
7. Är den nedre stängan säkrad och oförmögen att röra sig upp eller ner?
8. Är sidoräckets tyg korrekt placerad enligt avsnitt 6?
9. Är dragkedjorna helt stängda?
10. Är lyftthandtag monterade på varje ände av varje FloorBed 2 Siderail?
11. Är alla delar närvarande och fria från skador?
12. Är varje konsol för sidoräcke fäst på utsidan av huvudet/fotbrädan med en bult och mutter och på madrassplattformen med en bult och stift med R-klämma?
13. Är låskolvorna säkra och fungerar korrekt?
14. Är alla fixturer, beslag, muttrar, bultar etc. åtdragna och säkrade på lämpligt sätt?

15. Är ramen mekaniskt hel, utan tecken på skadade svetsar eller sprucken färg?
16. Är några delar av ramen böjda eller ur form?
17. Är FloorBed Siderails korrekt placerade på sängramen?
18. Om en specialmadrass eller madrassöverdrag används och avståndet från ovansidan av den okomprimerade madrassen till ovansidan av sidoräcket, om sådant finns, är mindre än 220 mm/8,7 tum, skall en riskbedömning utföras för att garantera likvärdig säkerhet.

Om skada, prestandaproblem eller anledning till oro noteras under denna inspektion ska FloorBed 2 Siderails tas ur drift och lämpliga åtgärder vidtas.

9. Rengöring och desinfektion

Försök inte rengöra FloorBed 2 Siderails när de är monterade på en säng. Ta bort sidoräckena från sängen och placera dem i en säker rengöringsmiljö.

För att desinficera FloorBed 2 Siderails, använd endast rengöringsmedel som är avsedda för användning inom hälso- och sjukvården. Använd inte slipmedel, rengöringsmedel eller andra material som kan skada beläggningen. Använd inte frätande ämnen, frätande medel eller starka syror.

Använd inte rengöringsmedel som kan ändra plastens struktur eller beteende (bensin etc.). Rengör sidoräckenas metallstruktur genom att torka av med en fuktig och ordentligt urvriden trasa.

Accora kan inte hållas ansvarigt för skador eller risk för skador om olämpliga rengörings- eller desinfektionsmedel används. Innan du rengör PU-materialet, se till att skummet som är inneslutet i sidoräckets överdrag tas bort. Gör så här för att packa upp övre stängan och öppna sedan blixtlåset för skumhöljet.

PU-materialet kan tvättas upp till 40 grader Celsius på ett känsligt program eller handtvätt i maskin, se guiden nedan. Blek inte, torktumla eller stryk inte.



10. Felsökning

Om några delar anses vara felaktiga, eller defekta, vänligen kontakta Accora och beställ ett byte. Försök inte reparera någon av komponenterna i händelse av skador eller defekter.

11. Förvaring

Förvara produkten omonterad och förvara alla delar säkert tillsammans inklusive denna bruksanvisning. Svep eller täck alla delar med ett skyddande hölje för att förhindra skador. Tygöverdraget måste tvättas och lämnas att torka ordentligt före förvaring. Tygöverdraget kan vikas och förvaras i ett plastförvaring för att skydda mot fukt och smuts. Placera inte tunga eller vassa föremål på FloorBed 2 Siderails. Förvara inte under fuktiga förhållanden.

12. Garanti

Garantiperioden för FloorBed 2 Siderail är 2 år. Om sängen anskaffats för vårdhem ska vårdhemmets underhållsavdelning kontakta Accora för att erhålla erforderliga delar.

13. Bortskaffande

I händelse av bortskaffande av material från sängen måste uttjänta delar bortskaffas i enlighet med gällande miljöbestämmelser.

14. Daglig kontroll

Daglig okulärbesiktning rekommenderas starkt och kan utföras av vårdare, användare eller annan person.

1. Fungerar FloorBed 2 Siderails enligt det avsedda syftet utan oväntat buller eller rörelse?
2. Finns det några tecken på missbruk, skador eller överdrivet slitage?
3. Finns det några hål eller revor i tyget, lösa eller trasiga trådar eller sömmar?
4. Är alla fixturer och beslag täta och säkra?
5. Verkar ramen för FloorBed 2 Siderail stabil och säker?
6. Är alla tillbehör monterade i linje med tillbehörstillverkarens eller tillbehörsleverantörens instruktioner?
7. Är alla elledningar (inklusive tillbehör, t.ex. madrassluftpump) säkrade och dragna för att förhindra skador?
8. Är området runt, ovanför och under sängen fritt från eventuella hinder?
9. Finns det någon risk för fastklämning eller patientskada?
10. **Viktigt!** Är alla plaststyrningar (fyra i varje ände av varje tygpanel) monterade och körs fritt i spåret för sidoräcket?
11. Är den nedre stängen säkrad och oförmögen att röra sig upp eller ner?
12. Monteras sidoräckets tyg monterat enligt märkningen (se etiketten "Topp och utsida") med dragkedjorna på utsidan?
13. Är dragkedjorna helt stängda?
14. Är lyfthandtag monterade på varje ände av varje FloorBed 2 Siderail Top Bar?

Om skada, prestandaproblem eller anledning till oro noteras under denna inspektion ska FloorBed 2 Siderails tas ur drift och lämpliga åtgärder vidtas.

15. Allmänt underhåll

Reparationer måste utföras av lämpligt utbildad och kvalificerad personal.

16. Tabell med symboler

	Varning, akta för potentiell fara – se bruksanvisningen
	Se bruksanvisning
	Se bruksanvisning
	Överensstämmer med den europeiska förordningen om medicintekniska produkter 2017/745
	Medicinsk enhet i enlighet med EU:s förordning om medicintekniska produkter 2017/745
	EG-representant
	Modellnummer
	Parti-/batchnummer
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare
Top bar 200cm	Toppstång 2 000 mm
Bottom bar 200cm	Nedre stång 2 000 mms
Top bar 220cm	Övre stång 2 200 mm
Bottom bar 220cm	Nedre stång 2 200 mm
	Monteringsorientering och varning

17. Kontaktdetaljer

	Storbritannien och övriga världen
Adress	Accora Ltd. Charter House, Barrington Road Orwell, Cambridge, SG8 5QP
Telefon	+44 (0)1223 206100
E-post	info@accora.care
Webbplats	www.accora.care

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Storbritannien

Tel: +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care