



ComfortSystem

- vår erfarenhet din trygghet



Instruktion för användare av Låsbar handkontroll HL70



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.

Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.

WWW.COMFORTSYSTEM.SE
036-51590
info@comfortsystem.se

Allmänt

Introduktion

Gratulerar till Ert val av en produkt från ComfortSystem Scandinavia AB. För att garantera att produkten tillverkas med en jämn, hög kvalitet och med så minimal miljöpåverkan som möjligt är ComfortSystem Scandinavia AB certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Varje produkt tillverkas i Sverige enligt en strikt kvalitetsnorm, där varje produkt testas med omsorg på fabrik innan leverans.

Kontakta oss gärna för support eller vid andra frågor och tankar gällande dina produkter från ComfortSystem!

Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information avseende produkten och dess hantering. Bruksanvisningen avser ett tillbehör till en produkt från ComfortSystem Scandinavia AB och är ett tillägg till den relaterade huvudprodukten.

Läs alltid huvudprodukten bruksanvisning noga för att säkerställa att tillbehöret används på ett korrekt och säkert sätt.

Generell information

Den låsbara handkontrollen kan användas ensam eller i kombination med produktens andra handkontroll. Läs alltid huvudprodukten- eller andra tillbehörsmanualer för att säkerställa korrekt användning.

Produkten får endast kompletteras och användas tillsammans med tillbehör godkända av ComfortSystem Scandinavia AB. Om sängens funktioner ändrar sig, upphör att fungera eller om missljud uppstår när sängen används skall den genast kontrolleras före fortsatt användning enligt anvisningar för underhåll/rekonditionering samt enligt felsökningsschema av ansvarig person.



ComfortSystem Scandinavia AB fransäger sig produktansvaret om produkten förändras, monteras eller används på annat sätt än vad som framgår av denna instruktion eller annan tillgänglig produktinformation.

Installera den låsbara manöverdosan

Anslut den låsbara manöverdosan direkt i sängens styrbox genom att ersätta den befintliga manöverdosan, eller via en kopplingsdosa vid användande av mer än en manöverdosa. Se huvudproduktens eller tillbehörets bruksanvisning för korrekt anslutning.

Användning av låsbar manöverdosa

Manöverdosan har fyra knappar som används för att styra sängens elektriska funktioner. Knapparna på manöverdosan är låsbara med en separat nyckel (Tillbehör).



Ryggdel

Upp: Tryck på knappens vänstra sida ▲

Ner: Tryck på knappens högra sida ▼

Höjdjustering sänglyft

Upp: Tryck på knappens vänstra sida ▲

Ner: Tryck på knappens högra sida ▼

Bendel

Upp: Tryck på knappens vänstra sida ▲

Ner: Tryck på knappens högra sida ▼

Sittläge/Planläge

Upp: Tryck på knappens vänstra sida ▲


Ner: Tryck på knappens högra sida ▼

Låsfunktion

Sätt in nyckeln i nyckelhålet för önskad funktion.

LÅS genom att vrida nyckeln medurs.

LÅS UPP genom att vrida nyckeln moturs.

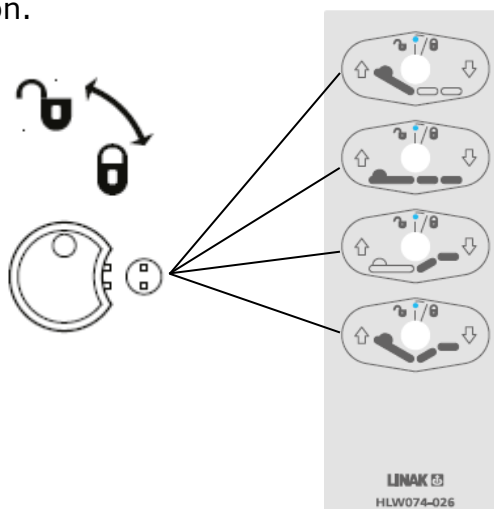

Återanvändning

Kassering

Miljön är något av det viktigaste vi har och måste därför värna om dem. Därför väljer vi aktivt att tillverka produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt, med så lång livslängd som möjligt.

Våra produkter är konstruerade för att enkelt kunna demonteras för återanvändning av de olika materialen när produkten inte längre kan användas. Produkterna består till huvuddelen av metall, trä och textilier. Separera och återvinn materialen individuellt enligt gällande lagar och föreskrifter för avfallshantering. Kontakta det företag som ansvarar för den lokala avfallshanteringen för att erhålla ytterligare information.



ComfortSystem Scandinavia AB
Vistakullevägen 18
SE-56146 Huskvarna
Sweden