




ComfortSystem

- vår erfarenhet din trygghet

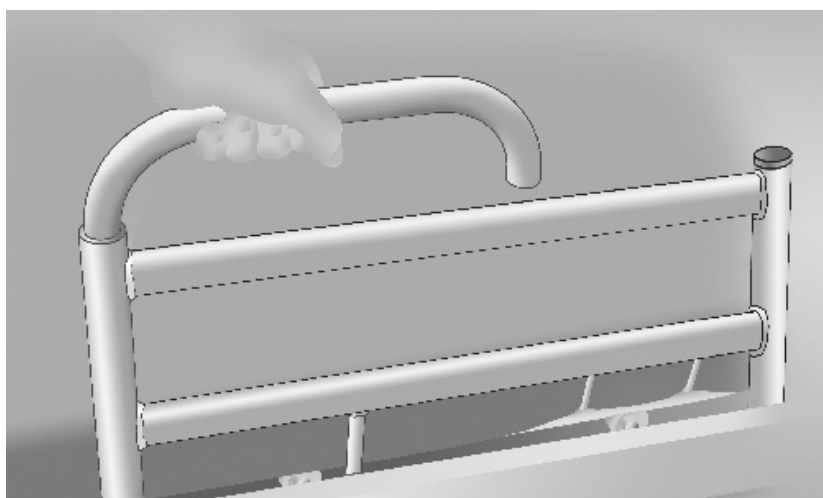

Instruktion för användare av

ASISST Stödhandtag

ART NR CS53
CS53S



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.

Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.



WWW.COMFORTSYSTEM.SE
036-51590
info@comfortsystem.se

MB.10 – Rev 2
Oktober 2022

Allmänt

Introduktion

Gratulerar till Ert val av en produkt från ComfortSystem Scandinavia AB. Varje produkt tillverkas i Sverige enligt en strikt kvalitetsnorm, där varje produkt testas med omsorg på fabrik innan leverans. Kontakta oss gärna för support eller vid andra frågor och tankar gällande dina produkter från ComfortSystem!

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information avseende produkten och dess hantering. Det är viktigt att hela bruksanvisningen läses noggrant innan användning och att säkerhetsinstruktioner följs för att säkerställa att produkten används på ett säkert och korrekt sätt. Vänligen säkerställ att produktens bruksanvisning finns tillgänglig under hela dess livstid.

Avsedd användning

Produkten är avsedd för vård i hemmiljö eller institutionell miljö under längre tid, motsvarande användningsområde 3 och 4.

Produkten är avsedd för inomhusbruk under normala temperaturer och normal luftfuktighet.

Produkten får endast användas tillsammans med produkter godkända av ComfortSystem Scandinavia AB. Om produktens funktioner ändrar sig, upphör att fungera eller om missljud uppstår när produkten används skall den genast kontrolleras av behörig person med erforderlig kunskap.



ComfortSystem Scandinavia AB frånsäger sig allt ansvar för skador och fel som uppstår om produkten förändras, används eller monteras felaktigt eller används på annat sätt än vad som framgår av denna instruktion eller annan tillgänglig produktinformation.

Säkerhetsinformation

Personskador samt skador på material kan förekomma om produkten används felaktigt. Därför är det alltid användarens fulla ansvar att tillse att produktens inte utsätts för högre belastningar än vad den är godkänd för, samt att klämskador inte uppstår mellan produkten och fasta & rörliga delar.

Överensstämmelse

Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745, klass I.

Produkten är utvecklad och konstruerad i enlighet med tillämpliga delar av IEC/FDIS 60601-2-52.

Meddelande till användaren















Om en allvarlig incident inträffar i samband med denna medicintekniska produkt, som påverkar användaren eller patienten, bör användaren eller patienten rapportera den allvarliga incidenten till tillverkare, (eller distributören), samt bör användaren också rapportera den allvarliga incidenten till den behöriga myndigheten i den Europiska medlemsstat där de är belägna.

Återanvändning

Miljön är något av det viktigaste vi har och måste därför värna om dem. Därför väljer vi aktivt att tillverka produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt, samt med längsta möjliga livslängd.

Våra produkter är konstruerade för att enkelt kunna demonteras för återanvändning av de olika materialen när produkten inte längre kan användas. Produkterna består till huvuddelen av metall, trä, plast och textilier. Separera och återvinn materialen individuellt enligt gällande lagar och föreskrifter för avfallshantering. Kontakta det företag som ansvarar för den lokala avfallshanteringen för att erhålla ytterligare information.

Förekommande symboler

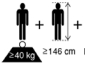	Tillverkarens adress
	Tillverkningsdatum
	Serienummer
	Referensnummer
	Högsta säkra last vid användning (SWL)
	Brukarens maxvikt
	Medicinteknisk utrustning
	Europeisk överensstämmelse
	Isoleringsklass 2
	Patientansluten del typ B
	WEEE-överensstämmelse
	Läs bruksanvisningen noga före användning och följ alla säkerhets och användningsinstruktioner
	Definition av lägsta vikt, kortaste längd och lägsta kroppsmasseindex för en vuxen brukare.
	Varning, var uppmärksam på risk. Läs produktens instruktionsanvisning.


Monteringsanvisning ASISST Stödhandtag

Montering

- ⌈ ⚠ ⌋ Montering måste utföras av en behörig person med erforderlig kunskap. Alla funktioner måste testas och godkännas av en behörig person efter montering, innan produkten tas i bruk.


Montering/Demontering

Assist kan monteras på sängens högre eller vänstra sida. Den översta delen av stödhandtaget kan vinklas ut 90 grader och användas som uppresningsstöd vid t.ex. förflyttning till/från rullstol, rullator eller liknande.

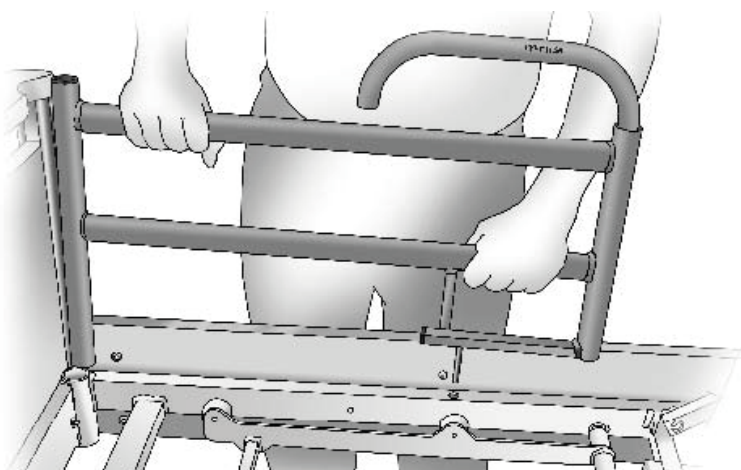

Figur 1

1. Placera stödhandtaget som på **figur 1** visar (stödhandtagets rör skall sitta i sängbottens uttag för tillbehör vid huvudändan). Stödhandtagets bult (justerbar i sidled) skall igenom hålet i sängbottens längsgående metallprofil.
2. Skruva fast stödhandtaget med bifogad låsspak enligt figur 2.
3. Vid demontering – gör i omvänd ordning

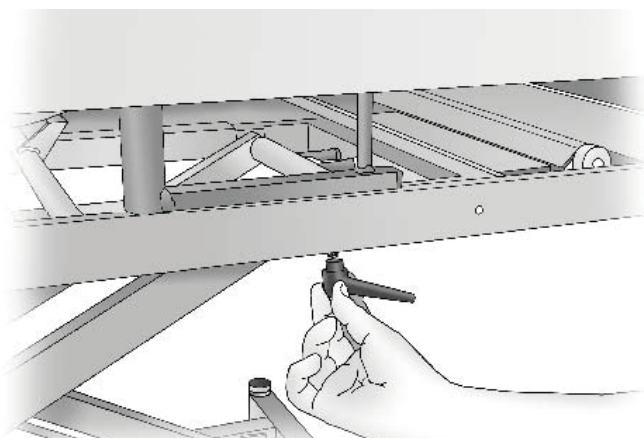

Figur 2

- ⌈ ⚠ ⌋ Kontrollera att stödhandtaget sitter stadigt och är korrekt monterat innan produkten tas i bruk.

Användning


Justera uppresningsstödet handtag

Den översta delen på ASSIST kan användas som uppresningsstöd och vinklas i en fast position om 90 grader ut från sängen.


1. Lyft handtaget rätt upp enligt figur 4.
2. Vrid handtaget 90grader ut från sängen (figur 5) och släpp ner. Handtaget 'söker' upp sin fasta position.



Säkerställ att handtaget är låst i sin fasta position innan handtaget används vid en förflyttningssituation.

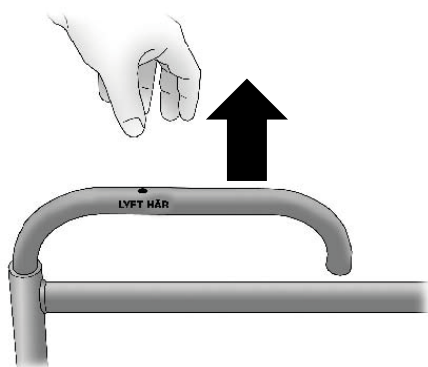

Figur 4

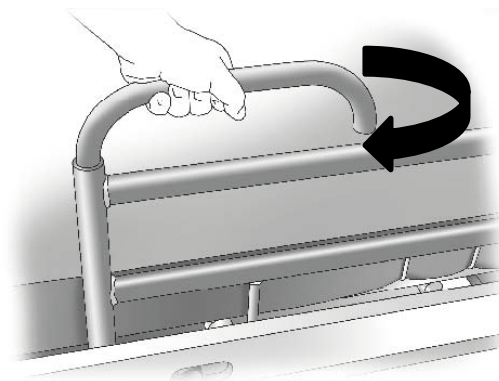

Figur 5




Handtaget får under inga omständigheter vinklas in över sängen eller parallellt med sängen (ner mot fotända). Det är alltid användares ansvar att tillse att detta inte förekommer.




Stödet får belastas med maximalt 75kg.



**Kontrollera att handtaget har hamnat i en låst position genom att försöka vrida på det.
OBS! Vid användning för förflyttning till/från säng ska uppresningsstödet vinklat ut från säng. Handtag skall användas enligt figur 6. Användning enligt figur 7 får EJ förekomma!**

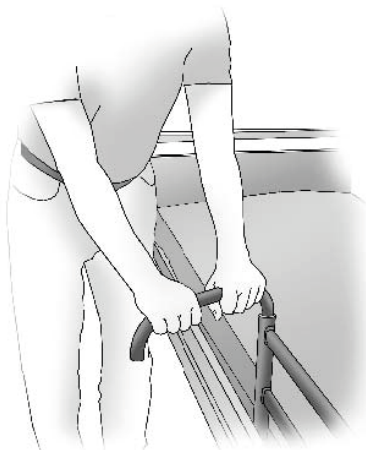

Figur 6

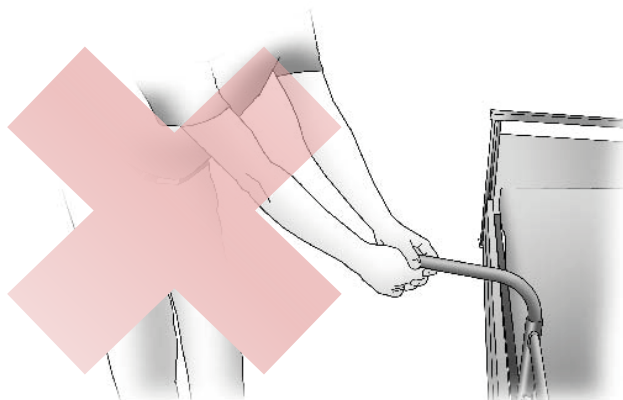

Figur 7

Skötselanvisning

Normal rengöring och skötsel

Stödhandtag ASSIST kräver normalt inget löpande underhåll. Stödhandtaget kan rengöras med vanligt förekommande rengörings och desinfektionsmedel. Appliceras med fuktig trasa.

Löpande tillsyn

Kontrollera inför varje användning att stödhandtaget sitter fast stadigt på sängbotten och att uppresningsstödet inte har något onormalt glapp eller funktionsstörning. Om detta upptäcks ska produkten omgående tas ur bruk och undersökas av person med erforderlig kunskap.

Kompabilitet

Skall användas som hjälpmedel vid lägesförändring i säng eller vid förflyttning till/från säng.

Stödhandtag ASSIST får endast monteras tillsammans med Qvintett-sängar från ComfortSystem som är tillverkade efter 2001-V.01.



ComfortSystem Scandinavia AB
Vistakullevägen 18
SE-56146 Huskvarna
Sweden
www.comfortsystem.se