

MONTERINGSANVISNING

BÅGE GRINDFÖRHÖJARE

BÅGE Grindförhöjare höjer den integrerade grinden med +7cm (CS54) alternativt +11cm (CS54H). BÅGE kan sitta kvar vid sänkning av grinden.

MONTERING AV BÅGE

Fäll upp sängens integrerade grind och placera BÅGE enligt bild 1. Notera att spännbandet ska vara på utsidan av grinden.



Bild 1

För bandet under grindbommen och trä igenom bandet enligt bild 2. Observera att man kan behöva lyfta upp bygeln över grindbommen för att kunna trä i bandet.

Bild 2



Bild 3



Bild 4

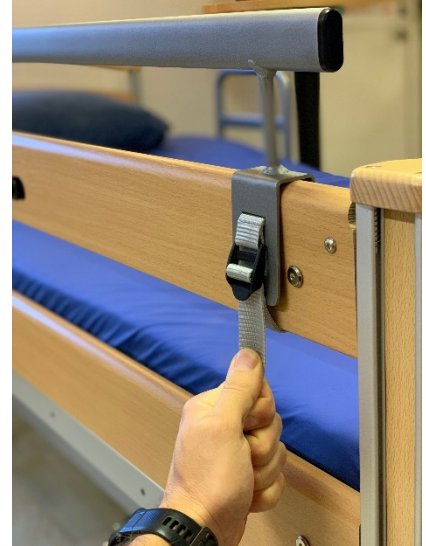


Bild 5

För tillbaka bandet under grindbommen och trä det igenom låsspännet enligt bild 3 och 4.

Spänn åt bandet genom att dra det nedåt enligt bild 5.

Upprepa samma procedur på båda sidor av BÅGE Grindförhöjare

Vid demontering av BÅGE, lyft spännet enligt bild 6 och trä ur bandet i omvänd ordning.

TILLBEHÖR

BÅGE Grindförhöjare kan utrustas med grindskydd, kontakt oss för mer information.

OBSERVERA

Enligt gällande standard för vårdängar ska det vara minst 22cm mellan ovansida madrass och ovansida grind.

RENGÖRING

Samtliga ytor kan rengöras med normalt inom vården förekommande rengörings och desinficeringsmedel.

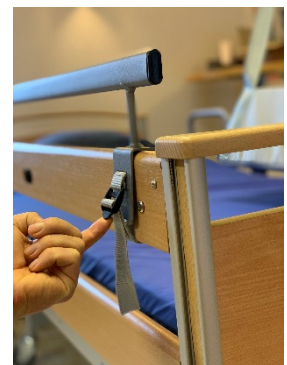


Bild 6

Besök oss på www.comfortsystem.se för mer information om våra tillbehör