



ComfortSystem

- vår erfarenhet din trygghet



Instruktion för användare av COMFORTABEL SIDE Sängryggstöd



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.

Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.



WWW.COMFORTSYSTEM.SE
036-51590
info@comfortsystem.se

MB.03 – Rev 2.0
Maj 2021



Innehållsförteckning

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Allmänt | 6. Skötselanvisning |
| 2. Avsedd användning | 7. Felsökning |
| 3. Monteringsanvisning | 8. Teknisk specifikation |
| 4. Montering på säng | 9. Tillbehör |
| 5. Bruksanvisning | |

1. Allmänt

Introduktion

Gratulerar till Ert val av en produkt från ComfortSystem Scandinavia AB. För att garantera att produkten tillverkas med en jämn, hög kvalitet och med så minimal miljöpåverkan som möjligt är ComfortSystem Scandinavia AB certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Varje produkt tillverkas i Sverige enligt en strikt kvalitetsnorm, där varje produkt testas med omsorg på fabrik innan leverans.

Kontakta oss gärna för support eller vid andra frågor och tankar gällande dina produkter från ComfortSystem!

Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information avseende produkten och dess hantering. Det är viktigt att hela bruksanvisningen läses noggrant och att säkerhetsinstruktioner följs för att säkerställa att produkten används på ett säkert och korrekt sätt.

Produktens förväntade livslängd

Den förväntade livslängden för sängryggstödet är fem år vid normal och korrekt användning samt att rekommenderat underhållsintervall efterföljs. Den verkliga livslängden kan variera beroende på användning.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för vård i hemmiljö eller institutionell miljö under längre tid, motsvarande användningsområde 3 och 4.

Produkten är avsedd för inomhusbruk under normala temperaturer och normal luftfuktighet.

Produkten är avsedd för vuxna personer som är minst 146cm långa, väger minst 40kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17.

Produkten och tillhörande hjälpmedel är avsedd för personer äldre än 12 år.

För uppgift om SWL (säkerhetslast) och maximal brukarvikt – se märketiketten som sitter på produkten!

Produkten får endast kompletteras och användas tillsammans med tillbehör godkända av ComfortSystem Scandinavia AB. Om produktens funktioner ändrar sig, upphör att fungera eller om missljud uppstår när den används skall den genast kontrolleras före fortsatt användning enligt anvisningar för underhåll/rekonditionering samt enligt felsökningsschema av ansvarig person.

Överensstämmelse

Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745, klass I.

Produkten är testad och godkänd enligt tillämpliga delar av IEC/FDIS 60601-2-52 av opartiskt testinstitut.



ComfortSystem Scandinavia AB fransäger sig produktansvaret om produkten förändras, monteras eller används på annat sätt än vad som framgår av denna instruktion eller annan tillgänglig produktinformation.



3. Monteringsanvisning

3.1 Uppackning

När förpackningen öppnas skall den ligga i planläge (ej på högkant).
Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet stämmer.
Detta innebär att motorns bakre fäste **ej** är monterat vid leverans.

3.2 Leveransomfattning

- Mekanik inklusive ryggtyg
- Motor
- ACD/C Adapter
- Handkontroll
- Motorfäste (L-form)
- Motorsprint
- Låssprint
- Spännremmar (2 st)
- Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd
- Quickguide


3.3 Montering mekanik

Börja med att lossa motorn från sitt säkrade transportläge.

Montera det L-formade motorfästet, använd den bifogade motorsprinten och låssprinten, montera enligt **bild 1**.



Var noggrann med att fästet blir monterat på rätt håll, felaktig montering kan leda till skada på Sängryggstödet.

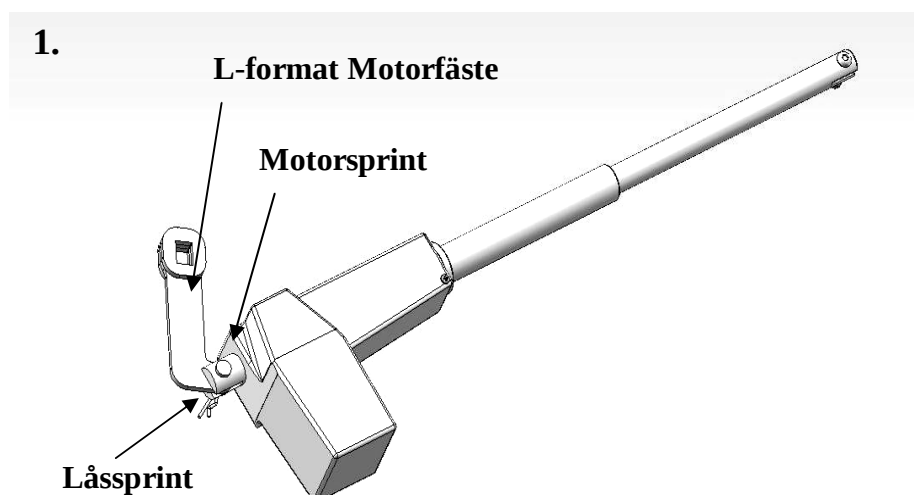



Ställ sängryggstödet på högkant se **bild 2**.

COMFORTABEL Sängryggstöd kan monteras med motor på höger eller vänster sida.

Om motorn är på rätt sida fortsätt monteringen enligt följande.

Om motorn skall vara på andra sidan gå vidare till punkt 3.4



Montera enligt **bild 3**.

Vrid över och montera det L-formade motorfästet på Sängryggstödet fyrkantstapp med hjälp av den bifogade stjärnratten och brickan.



Var noggrann med att motorpaketet blir monterat på rätt håll se **bild 2**.
Se till att brickan har kommit på rätt plats och att Stjärnratten blir ordentligt åtdragen.

**Kontrollera och jämför monteringen med bild 2,
för att säkerställa att alla delar monterats på rätt sätt.
Felaktig montering kan leda till skada på Sängryggstödet.**

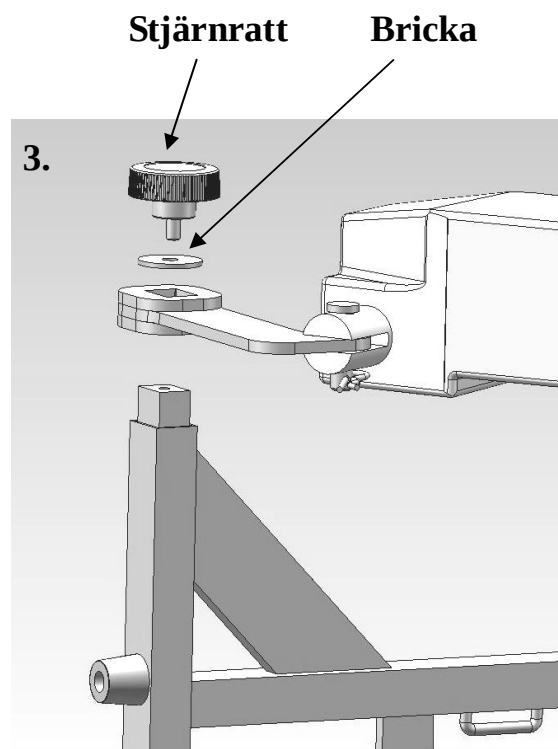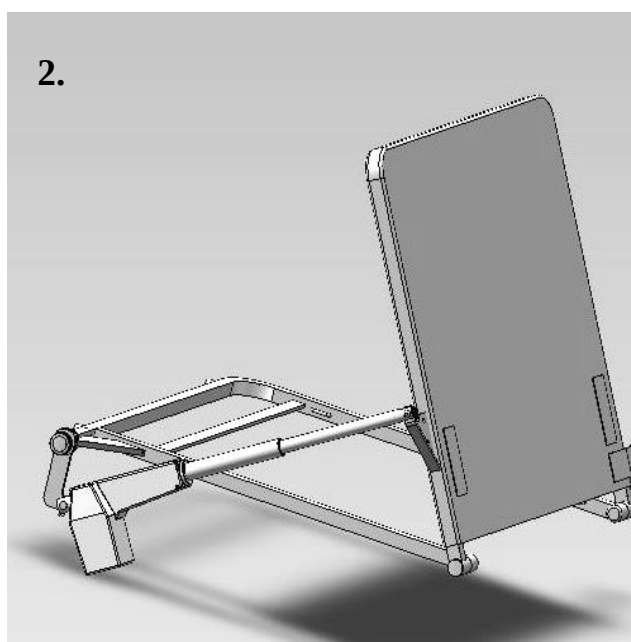







3.4 Anpassning motor höger/vänster sida

- Placera sängryggstödet på högkant enligt **bild 1**.
 - Om motorn är fastskruvad skruva bort ratten och demontera enligt **bild 2**.
 - Håll ett stadigt tag med ena handen i delen med ryggytyget och motorn.
 - Se till att motorn inte hänger fritt och tar skada vid omställningen.
 - Ta tag med andra handen och vrid rörkonstruktionen 360 grader tills den möter ryggytyget på nytt **se bild 3**.
 - Vrid runt motorn så att pilen på motorhuset pekar nedåt. Montera motorfästet med hjälp av låsratt och bricka på ryggstödet fyrkantstapp **se bild 2**.
-  - Var noggrann med att motorpaketet blir monterat på rätt håll och att stjärnratten blir ordentligt åtdragen.

För att säkerställa att alla delar monterats på rätt sätt

- **Kontrollera och jämför monteringen med bild 4.**

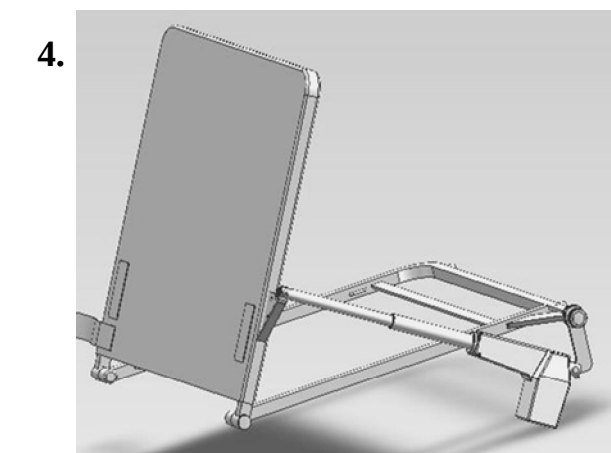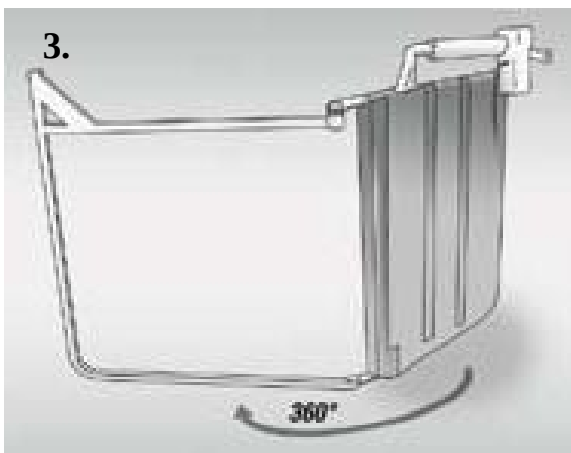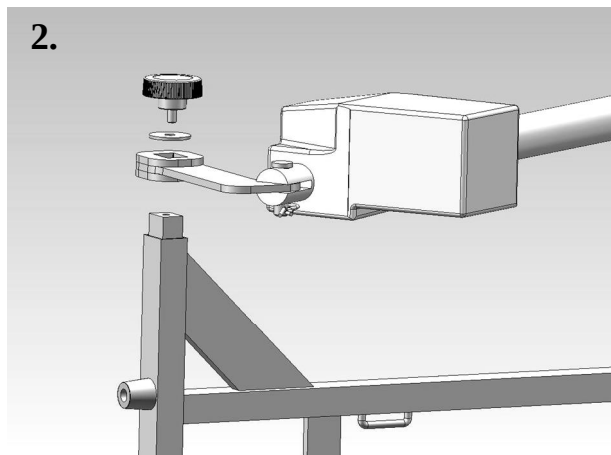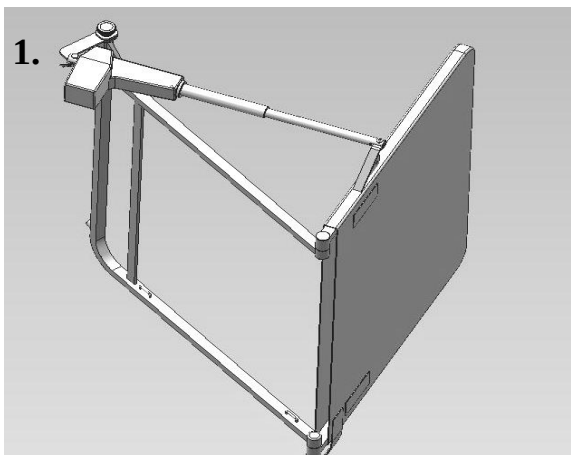



4. Viktig information före montering av Comfortabel Sängryggstöd



Sängen som COMFORTABEL Sängryggstöd monteras på skall vara stadig och stabil.

Resår madrass/skum madrass får inte vara för mjuk eller ha nedsjunkna ytterkanter.

Vid montering på sängar utan huvudgavel rekommenderas Sitt-lås (se punkt 9. Tillbehör).

Använd en stadig bäddmadrass 4-10 cm tjock, denna skall placeras uppe på ryggstödet.



Bäddmadrassen bör inte ha en glatt yta som glider i sidled mot ryggstödet.



Spännbandens lås skall **ej** placeras ovanpå bädden utan under eller på sidan av sängen

Det finns annars risk att låsen på spännbanden öppnas av belastningen från brukaren.

Rekommenderas: Spännbandets lås på sidan för bättre dragkraft.



4.1 Montering på säng

- Placera Sängryggstödet centrerat i sängens huvudända enligt **bild 1**.
- Montera spännbanden genom Sängryggstödet fixeringsöglor enligt **bild 2**.
- Drag spännremmarna runt om sängens undersida,
- Se till att spännanordningen på remmarna hamnar på sidan om sängen.
- Koppla samman remmarna med spännlåsen och drag åt dessa hårt **bild 3**.



4.2 Anslutning av transformator och handkontroll

- Anslut handkontrollen till AC/DC adaptorns hankontakt.
- Anslut Handkontrollens hankontakt till kontakten som är på motorns ovansida
- Anslut AC/DC adaptorns stickpropp till vägguttaget.



Efter fullständigt utförd montering

- Efterdrag Sängryggstödet monteringsremmar, med brukaren i säng.
- Provkör med brukaren i säng, Kontrollera att ryggstödet inte ändrat läge.



5. Bruksanvisning

5.1 Strömförsörjning

Sängryggstödet drivs med hjälp av en lågvoltsmotor och strömförsörjs av en till systemet anpassad transformator (30-33V).

- Anslut AC/DC-adapterns stickpropp till ett vägguttag.



- Kontrollera att Sängryggstödet har fri plats för att fällas uppåt/framåt.
- Provkör Sängryggstödet och kontrollera att nätkabel eller sladden till handkontroll ej fastnar eller kommer i kläm.

5.2 Reglering av Sängryggstödet

- Sängryggstödet regleras från handkontrollens två knappar. Pilar för **Upp** och **Ner**.



- Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under

5.3 Rekommenderad löpande säkerhetstillsyn

Säkerhetstillsynen Skall utföras i samband med ombäddning.



- Kontrollera att Sängryggstödet fortfarande har rätt placering på sängen.
- Kontrollera att spännbanden är hela och åtdragna (spännbanden skall eftersträckas med brukaren i säng)

6. Skötselanvisning

COMFORTABEL Sängryggstöd är en slitstark produkt som normalt kräver minimal skötsel.

Beroende på miljö och flitig användning kan visst underhåll krävas.

6.1 Normal rengörning

Sängryggstödet rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörningsmedel och desinfekteringsmedel kan användas.

Sängryggstödet överdrag kan tvättas i maskin **max 60 grader**.



6.2 Service/underhåll/besiktning

Kontrollera följande punkter att:

- Samtliga kablar och kontakter är intakta och oskadade.
- Mekanikens ledknutar är intakta och ej har stort glapp.
- Bakre motorfästet sitter stadigt åtskruvat med spännratten.
- Motorsprintar är intakta och ordentligt fixerade med ringsäkringar och låsmutter.
- Det inte förekommer missljud i motorer eller elektronik.
- Handkontrollen är hel och fungerar felfritt.
- Spännbanden inte är slitna och att låsen på dessa är intakta.
- Sömmar på ryggyget är hela
- Kardborrbanden är hela och har kvar sin greppförmåga.

Efter kontroll smörj leder och sprintar med krypsmörjmedel.

7 Felsökning

Sängryggstödet fungerar inte alls

- Kontrollera att AC/DC adaptern är ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att handkontrollen är ansluten till motorn på sängryggstödet.
- Kontrollera att motorkabeln är ansluten till AC/DC enheten.

Om felet kvarstår kontakta leverantören.

Sängryggstödet fungerar ibland

- Kontrollera att grön lampa lyser på AC/DC adapter
- Kontrollera att handkontrollen inte har några skador.
- Kontrollera handkontrollens kabel och kontakt att dessa är hela och ej har några skador.

Om felet kvarstår kontakta leverantören.

8 Teknisk specifikation

Comfortabel finns för sängstorlekar:	80, 90	105,	120 cm
- Vikt:	10 kg	13 kg	17 kg
- Brukarvikt	145 kg	145 kg	145 kg
- Maxbelastning	70 kg	70 kg	70 kg
- Ryggstöds längd:	75 cm	75 cm	75 cm
- Ryggvinkel lägsta/högsta	0-70°	0-70°	0-70°



9. Tillbehör



9.1 Sitt-lås

- Sitt-låset är ett tillbehör som ger stor fördel, när man använder sängar utan huvudgavel. Tillbehöret förhindrar att Sängryggstödet åker högre upp i säng.
- Sitt-låset förbättrar även låsningen av Sängryggstödet i sidled.



9.2 Stöd och vändhandtag till COMFORTABEL Sängryggstöd

- Handtaget underlätta vändning i säng och ger ett bra stöd vid uppresning.
- Handtaget får vid användande ej utsättas för stora sidobelastningar.
Detta kan orsaka att ryggstödet kommer ur sitt läge.



Återvinning & Kassering

Miljön är något av det viktigaste vi har och måste därför värna om dem. Därför väljer vi aktivt att tillverka produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt, med så lång livslängd som möjligt.

Våra produkter är konstruerade för att enkelt kunna demonteras för återanvändning av de olika materialen när produkten inte längre kan användas. Produkterna består till huvuddelen av metall, trä och textilier. Separera och återvinn materialen individuellt enligt gällande lagar och föreskrifter för avfallshantering. Kontakta det företag som ansvarar för den lokala avfallshanteringen för att erhålla ytterligare information.

Vår erfarenhet - din trygghet

ComfortSystem har sedan 1987 haft i stort sett samma ägandestruktur och verkat under samma namn -ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att Du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
- för trygg omvårdnad



ComfortSystem Scandinavia AB * Vistakullevägen 18 * SE-561 46 HUSKVARNA
Tfn +46 (0)36 51590 * info@comfortsystem.se * www.comfortsystem.se