



Säkerhetsomslag till FloorBed och CommunityBed – Bruksanvisning

IFU-FL1-012SV Rev 01
November 2023

Innehåll

Titel	Sida
Välkommen	2
Allmänna varningar	3
1. Säkerhetsanvisningar	3
2. Avsedd användning	3
3. Tekniska specifikationer	4
4. Montering	4
5. Funktionskontroll	7
6. Rengöring och desinfektion	8
7. Förvaring	8
8. Garanti	8
9. Avfallshantering	8
10. Symboler	9
11. Kontaktuppgifter	10

Translated from IFU-FL1-012EN Rev 04

Välkommen

Hej!

Tack för att du har köpt en hälsovårdsprodukt från Accora. Innan du använder sängen måste du läsa och förstå alla anvisningar i den här bruksanvisningen. All hantering av sängen måste utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Se till att bruksanvisningen finns tillgänglig för användare och operatörer under hela sängens livslängd.

Om du behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss. Se avsnitt 11 för regionspecifika kontaktuppgifter.

Den här bruksanvisningen gäller för säkerhetsomslaget till FloorBed/CommunityBed.

Innan du börjar använda tillbehöret ska du läsa denna bruksanvisning noga. All hantering av säkerhetsomslaget måste utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

All hantering som inte utförs enligt bruksanvisningen sker på egen risk och Accora tar inget ansvar för eventuella person- eller egendomsskador. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig för användare av säkerhetsomslaget.

Säkerhetsomslaget bör kontrolleras regelbundet av vårdaren/användaren för att säkerställa att installationen är korrekt och att den fungerar som avsett.

Designpolicy och upphovsrätt

® och ™ är varumärken som tillhör Accora Ltd om inget annat anges. Eftersom vår policy är att ständigt förbättra oss förbehåller vi oss rätten att ändra produkter utan föregående meddelande.
© Accora Ltd 2023.

ALLMÄNNA VARNINGAR!

1. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
2. Dessa anvisningar måste följas för att garantera en säker och effektiv användning av omslaget samt säkerheten för användare, vårdgivare och omgivningen.
3. Säkerhetsomslaget måste monteras, placeras och användas enligt dessa instruktioner.
4. Säkerhetsanvisningarna för användning av säkerhetsomslaget och bruksanvisningen måste följas noga.
5. Säkerhetsomslaget får inte utsättas för rök, öppen eld, extrema temperaturer, brandfarliga gaser eller andra farliga ämnen eller situationer.
6. Patienter eller användare bör riskbedömas för att säkerställa att de kan förstå denna bruksanvisning och använda omslaget på ett säkert sätt utan risk för sig själva eller andra.
7. Accora kan inte hållas ansvarigt för person- eller egendomsskador eller olyckor som uppstår till följd av otillåtna förändringar, reservdelar som inte är original, försumlighet eller användning som inte följer den här bruksanvisningen.

1. Säkerhetsanvisningar

1. Innan du använder säkerhetsomslaget ska du läsa bruksanvisningen och använda anordningen enligt beskrivningen i den.
2. Användaren bör förstå hur säkerhetsomslaget fungerar innan det monteras på sängen.
3. Använd inte säkerhetsomslaget om det är skadat eller defekt, det kan leda till personskador.
4. En riskbedömning måste utföras innan sängen används av en patient.

2. Avsedd användning

Efter en riskbedömning kan säkerhetsomslaget monteras på de sängar som listas nedan för att skydda, underhålla, förbättra, kompensera eller lindra patientens tillstånd.

Beskrivning	Användargrupp
FloorBed 1 NSB-0-FL1-200 Floorbed 2 NSB-0-FL2-200 FloorBed 5 NSB-0-FL5-200 CommunityBed NSB-0-CB1-100	Vuxna patienter Min. 146 cm lång

Efter en riskbedömning och vid användning tillsammans med IFU, anges kombinationer som är lämpliga för barn i tabellen nedan:

Beskrivning	Användargrupp
FloorBed 1 Junior omfattar FloorBed 1 NSB-0-FL1-200 & Stötfångare för huvud- och fotgavel BMHNE-0-FL4-000 & Säkerhetsomslag SLE-0-FL4-000 eller Säkerhetsomslag SLE-0-FL4-100	Barnpatienter Min. 75 cm lång Max. 155 cm lång
FloorBed 2 Junior omfattar FloorBed 1 NSB-0-FL2-200 & Stötfångare för huvud- och fotgavel BMHNE-0-FL4-500 & Säkerhetsomslag SLE-0-FL4-100 & Skyddsskenor PROPL-0-FL4-500	Barnpatienter Min. 75 cm lång Max. 155 cm lång
CommunityBed Junior omfattar FloorBed 1 NSB-0-CB1-100 & Stötfångare för huvud- och fotgavel BMHNE-0-FL4-000 & Säkerhetsomslag SLE-0-FL4-100	Barnpatienter Min. 75 cm lång Max. 155 cm lång

Obs!

- Säkerhetsomslaget passar inte CommunityBed NSB-0-CB1-000.
- Säkerhetsomslaget får inte användas om en sängspak har monterats på Accora FloorBed eller CommunityBed.

3. Teknisk specifikation

Beskrivning	Säkerhetsomslag	
Artikelnummer	SLE-O-FL4-000	SLE-O-FL5-200
Passar sängar	FloorBed 1 Floorbed 2	FloorBed 1 Plus
Artikelnummer	NSB-O-FL1-200 NSB-O-FL2-200	NSB-O-FL5-200
Vikt	1,4 kg/3,1 lbs	1,4 kg/3,1 lbs

Obs!

- Säkerhetsomslaget passar inte CommunityBed NSB-O-CB1-000.
- Säkerhetsomslaget får inte användas om en sängspak har monterats på Accora FloorBed eller CommunityBed.

4. Montering

VARNING!

Säkerhetsomslaget måste monteras med hänsyn till bästa praxis enligt beskrivningen nedan. Om så inte görs kan det leda till klämning och allvarliga personskador.

Monteringen **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla funktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter montering.

Montering **MÅSTE** ske på en ren, ostörd plats och barn och husdjur ska hållas på avstånd.

Säkerhetsomslaget får inte monteras när en patient ligger i sängen.

Obs!

Bilderna nedan visar hur säkerhetsomslaget monteras på en FloorBed 1.

Montering på FloorBed 1 Plus och FloorBed 2 följer samma tillvägagångssätt.

Montering på CommunityBed följer samma tillvägagångssätt, men det finns skillnader som beskrivs i de aktuella stegen.

- 1) Ta ut säkerhetsomslaget ur förpackningen.
- 2) Lägg omslaget på sängen enligt bilden nedan.
 - a) Observera riktningen (fotändan identifieras på etiketterna).
 - b) Den långa fliken med material ska hänga ner på ena sidan och en kort bit av materialet på den andra sidan.



- 3) Hög sängens ryggstöd till dess högsta läge och dra säkerhetsomslagets ryggstödsficka över madrassplattformens huvudände.



- 4) Lyft sängens benstöd till dess högsta läge och dra benstödsfickan över madrassplattformens bändel enligt bilden nedan.



- 5) Ta den långa materialfliken från sidan av säkerhetsomslaget och för den under sängramen, fäst den med dragkedjan på den korta materialfliken och se till att alla kablar omsluts av säkerhetsomslaget. Lämna dragkedjan öppen i huvud- och fotändarna. De stängs senare i monteringen.

Obs! Se till att handenheten kommer ut ur sängen i önskad ände.



- 6) För FloorBed 1, FloorBed 1 Plus och FloorBed 2 drar du ut elkontakten ur vägguttaget och kopplar sedan bort strömförsörjningen från sängen. Dra ut lågspänningskontakten genom hålet i




säkerhetsomslaget och återanslut till strömförsörjningen enligt följande bild.




- 7) För CommunityBed låter du nätkabeln komma ut ur säkerhetsomslaget vid sängens hörn.

- 8) För FloorBed 1, FloorBed 1 Plus och FloorBed 2 avlägsnar du den glidande skyddskåpan från lyftdonets anslutning vid sängens huvudände och drar ut manöverdonets kabel. Dra manöverdonets kabel genom hålet i säkerhetsomslaget och anslut den igen enligt bilden nedan (1). Sätt tillbaka skyddskåpan (2).

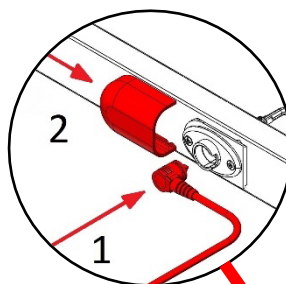


9) För CommunityBed tar du bort manöverdonskabeln från manöverdonet enligt bilden nedan. Ta bort hållarklämman från lyftdonets bas genom att trycka på endera sidan (A) av klämman och sedan lyfta den (B). Använd en liten skruvmejsel med platt blad om så behövs för att lyfta klämman. Ta bort kabeln.

10) Dra manöverdonets kabel genom hålet i säkerhetsomslaget. Återanslut kabeln till manöverdonet genom att trycka in kabeln i uttaget (C) och sedan trycka ner klämman (D).

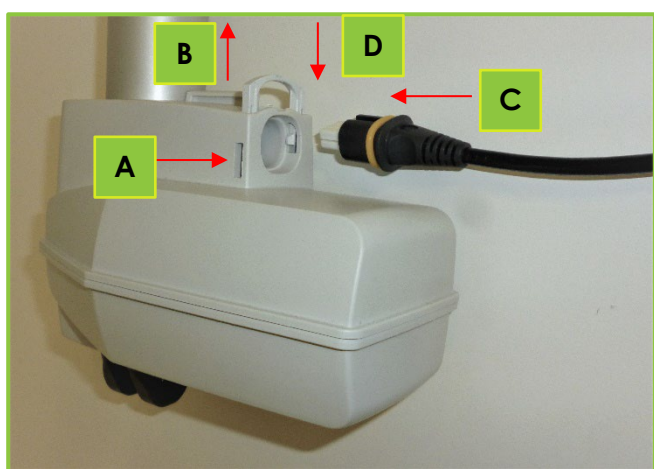

11) Använd dragkedjan för att stänga säkerhetsomslaget runt sängens huvudända enligt bilden nedan.

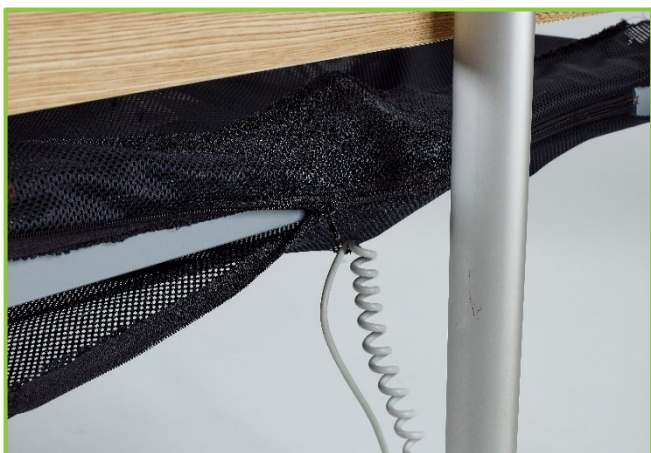


12) Se till att handenhetens kabel går genom öppningen på vänster sida av säkerhetsomslaget i den ände av sängen som är lämpligast.



- 13) Upprepa steg 6 till 10 vid sängens fotända för att få det resultat som visas nedan.



- 14) Montera madrassguiderna enligt bruksanvisningen för FloorBed 1, FloorBed 1 Plus, Floorbed 2 eller CommunityBed. Det finns spår i säkerhetsomslaget för montering av madrassguiderna enligt bilden nedan.

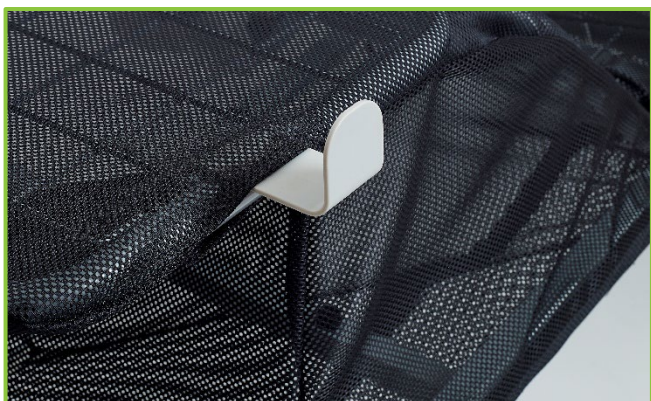

- 15) Om sängen ska användas med stötdämpare i huvud- och fotändarna ska de monteras enligt bruksanvisningen.
- 16) För FloorBed 1, FloorBed 1 Plus och CommunityBed måste säkerhetsomslaget monteras på stötfångarna i sängens båda ändar enligt bilden nedan.
- 17) För FloorBed 2 är säkerhetsomslaget inte fäst på stötfångarna.



5. Funktionskontroll

VARNING!

Monteringen **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla sängfunktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter montering.

Funktionskontrollen får inte utföras när sängen används.

Utför följande sängfunktioner och kontrollera om det förekommer oväntade ljud eller rörelser:

1. Höj och sänk sängen.
2. Höj och sänk ryggstödet.
3. Höj och sänk benstödet.
4. Höj och sänk sidoräcken (om sådana monterats).
5. På FloorBed 1, FloorBed 1 Plus och CommunityBed kontrollerar du att säkerhetsomslaget är fäst på stötdämparna i huvud- och fotänden, om sådana finns.

6. Rengöring och desinfektion

VARNING!

Rengöring och desinfektion **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla funktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter rengöring eller desinfektion.

Säkerhetsomslaget **MÅSTE** rengöras och desinficeras innan sängen återanvänds för en annan patient.

Använd endast rengöringsmedel som är avsett för användning inom sjukvården för att desinficera madrassplattformens säkerhetsomslag. Använd inte slipmedel, stålull eller annat som kan skada materialet. Använd inte frätande eller etsande ämnen eller starka syror.

Använd inte rengöringsmedel som kan förändra plastens struktur eller beteende (bensin etc.).

Säkerhetsomslaget kan maskintvättas i 40 grader Celsius men får inte torktumlas eller strykas.

7. Förvaring

För problemfri förvaring rekommenderar vi:

1. Säkerhetsomslaget ska förvaras i en temperatur mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F och +122 °F).
2. Säkerhetsomslaget bör förvaras i en relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) mellan 30 och 75 procent.

8. Garanti


Modellnummer	SLE-0-FL4-000 SLE-0-FL5-200
Garantitid	2 år

9. Avfallshantering

Vid kassering av säkerhetsomslaget ska uttjänta delar kasseras i enlighet med gällande miljöbestämmelser.

10. Symboler

	Varning, se upp för potentiell fara – se bruksanvisningen
	Se bruksanvisningen
	Modellnummer
	Batchnummer
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare
	Överensstämmer med EU-förordningen om medicintekniska produkter 2017/745
	Medicinteknisk produkt i enlighet med EU-förordningen om medicintekniska produkter 2017/745
	EG-representant
	Får ej strykas
	Får ej torktumlas
	Får ej blekas
	Torka av
	Sängens fotände
	Inkompatibla sidoräcken kan leda till fara
	Patientens längd (vuxen)

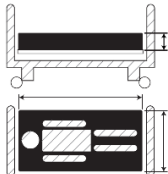	Patientens längd (barn)
	Inkompatibel madrass kan leda till fara

11. Kontaktuppgifter

Adress	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP UK
Telefon	+44 (0)1 223 206 100
E-post	info@accora.care
Webbplats	www.accora.care

Denna sida lämnas avsiktligt tom

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Storbritannien

T: +44 (0)1 223 206 100
info@accora.care
www.accora.care

IFU-FL1-012SV Rev 01