



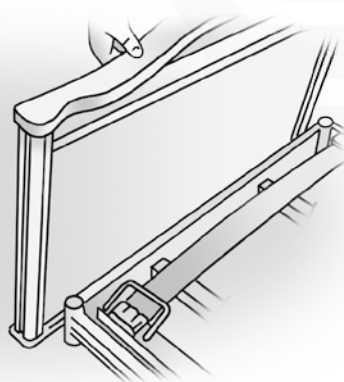

Instruktioner för användare av Sänggram med integrerad grind 4-40

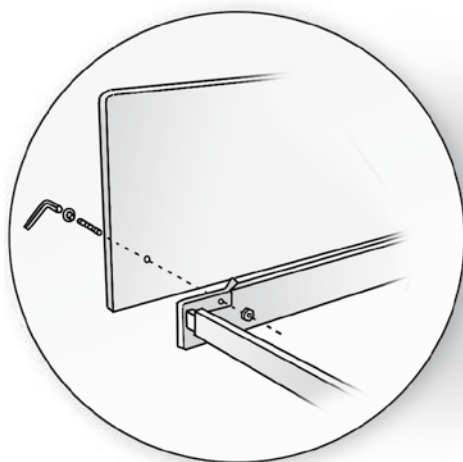

Produkten är ett tillbehör och får enbart användas till Qvintett vårdsängar, tillverkade av ComfortSystem Scandinavia AB. Denna bruksanvisning är ett kompletterande dokument till Instruktion för användning av Qvintett vårdsängar, modell CS4, dokument namn "CS4.MB12-XX". Samtliga riktlinjer i vårdsängens instruktion ska alltid tas i beaktande i sin helhet i kombination till det här dokumentet.

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats www.comfortsystem.se.



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.

Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.





Kompatibilitet

Den här bruksanvisning avser Sänggram 4-40, art.nr 458XXX.

Monteringsanvisning

Scanna QR-koden för att komma till en instruktionsvideo avseende montering av produkten.



0.0 Leveransen omfattar

- 1 st huvudgavel
- 1 st fotgavel
- 2 st övre grindbommar (med uttag för låsmekanism)
- 4 st undre grindbommar (aluminium)
- 1 st skruvpåse

OBS! Monteringen kräver verktyg i form av lämplig insettnyckel och skiftnyckel.





1.0 Montering gavlar

Montera ihop pinnbult och bultskalle (mässing).

Tryck i pinnbultarna i gavlarna.

Montera gavlarna på sängen men skruva inte åt utan låt gavlarna sitta löst så de 'hänger' ut så som bilden visar.

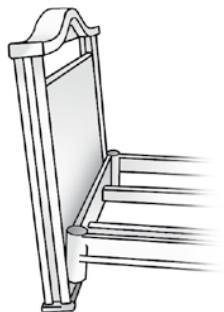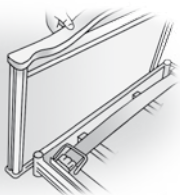



2.0 Montering grindbommar


Lossa de två låsskruvarna som fixerar fotgavelplåten i sängbotten, drag ut den ställbara fotändan ca. 35mm till monteringsläge.



Montera aluminiumbommar.

För in den vita plastdetaljen i de två understa spåren i gavelns plastdetalj, för sedan in plastdetaljen till hälften i motsvarande ända och centrera grindbommen. Var noggrann med centrereringen för att underlätta resterande montering.

Upprepa förloppet på samma sätt med samtliga aluminiumbommar.

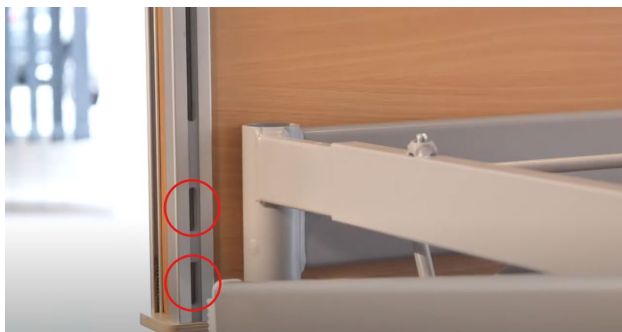

Montera överbommar.

Greppa grindbommen med båda händerna, sätt pekfingrarna i fingergreppen och håll dessa indragna mot centrum. För in överbommens plastdetalj i översta spåret i gaveln. För sedan in plastdetaljen på samma sätt i motsvarande ända. Centrera bommen och släpp fingergreppen.



Se till att sängen är i en bra arbetshöjd. Lyft lätt i fotgaveln och skjut in fotgaveln tills halva markeringshålet täcks av sängsidoprofilen (se bild nedan).

Kontrollera att fixeringsläget är rätt, mellanrum bommar och gavlar skall måttet vara ca 3mm.

Drag åt låsskruvarna i sängbotten med en insexnyckel på båda sidor.

Drag åt gavelbultarna


Kontrollera att grinden löper lätt och på ett korrekt sätt, samt att grinden låser i översta läget. Provbelasta grinden i låst läge genom att trycka nedåt



Efter att samtliga grindbommar är på plats (tre grindbommar på var sida om sängen) skall gavlarna och sängbottens justeringsskruv skruvas åt.



! Kontrollera – om grindarna är rätt monterade skall det var ett mellanrum om ca 25 mm mellan grindbommarna.

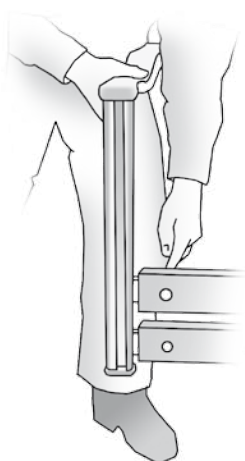



Bruksanvisning

1.0 Att använda grinden


Grindbommarna tjänar i lägsta läge som "längsidor" till sängramen.

För att bilda grind:

- Placera händerna med ca 1 meters mellanrum med utgångspunkt från sängens mitt.
- Lyft enbart i den övre grindbommen så högt det går.
- Låsmekanismen låser grinden automatiskt i det översta läget.



Kontrollera att låsmekanismen fungerar genom ett lätt tryck nedåt på den övre bommen.

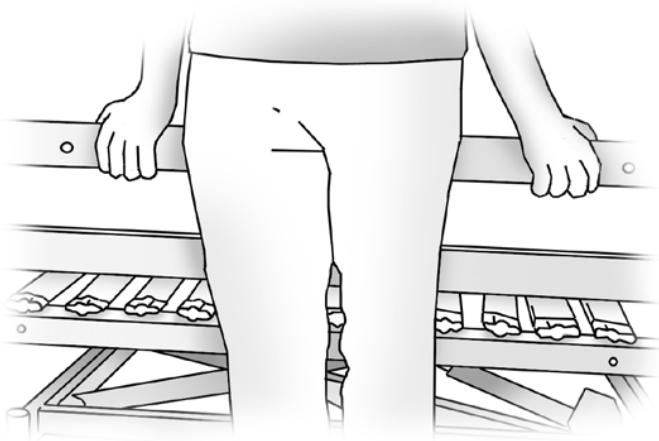



2.0 Att fälla ner grinden

I övre grindbommen finns två urtag (höger och vänster) för frigörning av låsmekanismen.

- Placera höger och vänster pekfinger i respektive urtag
- Lyft grindbommen uppåt och dra därefter bägge låsmekanismerna mot centrum
- Sänk ner grinden. OBS! Du behöver EJ hålla in låsmekanismen under sänkning.



Kontrollera att den sängliggande inte har armar och ben mellan grindbommarna.



Grindar får EJ snedställas. En snedställd grind uppfyller EJ säkerhetsnormen enligt EN-norm för grindar!



Max madrasshöjd

Grindarna är konstruerade för madrass med en maximal höjd om 20cm, för att bibehålla ett avstånd om 22cm, från sängbotten till sänggrindens överkant.

Vid behov av en högre grindhöjd kan grinden kompletteras med grindförhöjare från ComfortSystem.

Skötselanvisningar

Skötsel och rengöring

Sänggram med integrerad grind kräver normalt ingen löpande skötsel.

- **Normal rengöring.** Normalt inom vården förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas. Använd en fuktig trasa vid rengöring.
- **Om grinden upplevs som trög**
Gavlarnas grindspår kan behöva smörjas för att gå lätt.
Litiumfett på sprayburk (eller likvärdigt) rekommenderas.



Teknisk specifikation - Madrassmått

Qvintett våldsäng tillsammans med Sängram 4-40 är avsedd för följande madrassmått. Vid behov av högre madrasser kan grindarna utrustas med grindförhöjare, +7cm alternativt +11cm. Vid behov av att fylla ut utrymmet mellan madrass och grind finns madrassbreddare att tillgå.

90cm

Madrassbredd: 85-90cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 20cm

105cm

Madrassbredd: 100-105cm

Madrasshöjd: Min 12cm – Max 20cm

120cm

Madrassbredd: 115-120cm

Madrasshöjd: Min 12cm - Max 20cm

Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
– *vår erfarenhet din trygghet*

ComfortSystem Scandinavia AB · Vistakullevägen 18 · 561 46 Huskvarna
· Sweden Tfn +46 (0)36 51 590 · info@comfortsystem.se · www.comfortsystem.se