



Quickguide

Toto[®] – automatiserad lägesändring, med
Toto[®] Touch-styrenhet

toto[®]

Installation av Toto-systemet



Denna snabbguide har tagits fram för att hjälpa vårdpersonal och andra användare med de funktionella aspekterna av systemet. Guiden ersätter inte de allmänna säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder och rekommendationer som finns i användarguiden för Toto®-systemet samt Toto® Touch-styrenhet.

Vårdpersonal behöver ofta ompositionera sina patienter var fjärde timme – morgon, middag och kväll – för att minska risken för trycksår. Detta kan vara mycket tidskrävande, ineffektivt, resurskrävande, samt innebära skaderisk för både personal och patienter.

Toto är ett automatiskt system för lateral positionering som är utformat för att hjälpa till med att vända patienter. Systemet består av en digital styrenhet och en vändplattform som placeras under patientens madrass. Toto positionerar automatiskt patienten och avlastar trycket på de mest utsatta områdena.

Till skillnad från andra system för patientpositionering erbjuder Toto regelbunden och konsekvent helkroppsvändning i ett lätt, användarvänligt format som är enkelt att installera och komma åt.

Installation

Placera och centrera plattformen direkt på sängbotten och placera sedan madrassen eller madrasssystemet direkt ovanpå.

⚠ VIKTIGT Plattformen ska kunna blåsas upp fritt. Kontrollera att båda sidor av plattformen kan blåsas upp utan att begränsas av madrassen eller sängramen.

Toto Touch-styrenhet

Använd krokarna på baksidan av styrenheten för att hänga den säkert på sängens fotgavel. Alternativt placera den på en stabil horisontell yta. Anslut till nätström via den medföljande strömkabeln.

⚠ VIKTIGT Vårdpersonal bör fastställa uppblåsnings- och vilotider.

Installation av Toto-systemet

Anslutning av plattformen till styrenheten

Använd snabbkopplingarna för att ansluta de grå uppblåsningsslangarna till plattformens luftcellsslangar – röd till röd.

Anslut de grå uppblåsningsslangarna till styrenheten.

Kontrollera att CPR-lufttömningsventilerna sitter ordentligt på plats.

Bruksanvisning

- För att slå på enheten, tryck och håll ned PÅ-knappen (1) i tre sekunder.
Standardinställningarna är:
Val av luftcellssidor (2) – båda sidorna
Uppblåsningstid för luftceller (9) – 120 minuter
Vilotid för luftceller (8) – 120 minuter
- För att ändra standardinställningarna, tryck på knappen för att bläddra genom de LED-belysta alternativen tills du har kommit till ditt önskade val.
- Uppblåsning av luftceller startar, och varje sida förblir uppblåst under den valda tidsperioden.

Observera - Om styrenheten stängs av återgår den till standardinställningarna när den slås på igen. Välj om de önskade alternativen enligt instruktionerna ovan.


Rengöring och skötsel


Alla komponenter kan rengöras och dekontamineras med antingen en 0,1 % eller 1 % klorbaserad lösning, följt av en noggrann sköljning med rent vatten. Kontrollera att styrenheten är avstängd och urkopplad innan rengöringen påbörjas.

⚠ OBS!

ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV VÅRDPERSONAL OCH OMSORGSIVARE

Vänligen välj bland följande alternativ efter installation för att ange de inställningar som valts på Toto Touch®-styrenheten.

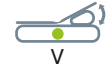VAL AV LUFTCELLSSIDOR	UPPBLÅSNINGSTID	VILOTID
☐  V&H	☐ 240 min	☐ 30 min
☐  H	☐ 180 min	☐ 60 min
☐  V	☐ 120 min	☐ 120 min
	☐ 60 min	☐ 180 min
	☐ 30 min	☐ 240 min

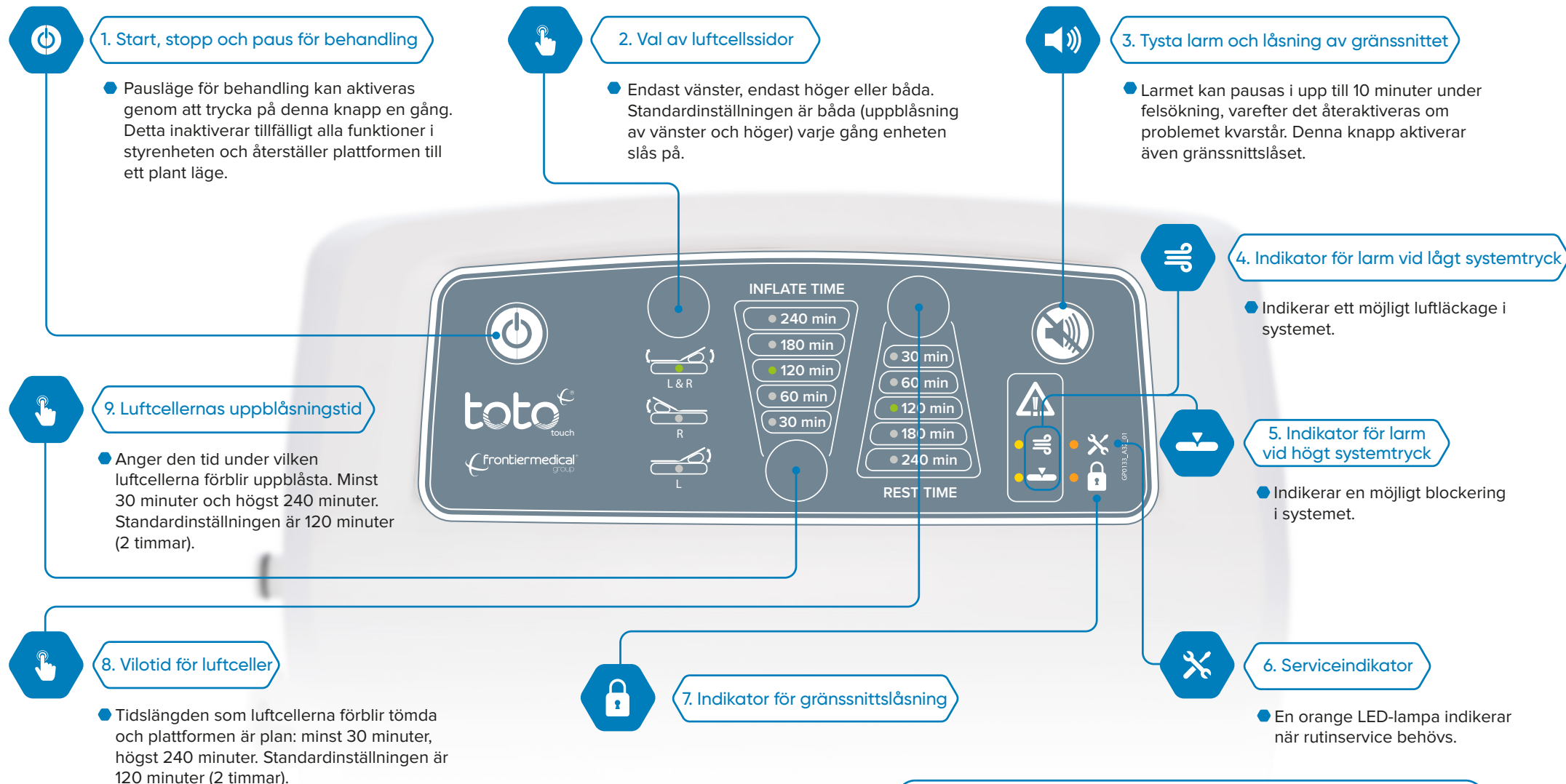

! För ytterligare information om systemlarmen, se felsökningsguiden på baksidan.



Skanna för att titta

Titta på videon "Toto Snabbguide"
<https://youtu.be/LcAdJZTFbVo>

Felsökningsguide för systemfel

Problem	Orsak	Inledande kontroller / Felsökning
 Inga lysdioder lyser; inget hörbart larm.	- Styrningsenheten kan vara fränkopplad från strömkällan. - Säkring kan behöva bytas.	- Kontrollera att styrningsenheten är ansluten till ett aktivt vägguttag som är påslaget. - Kontrollera att styrningsenheten är påslagen. "Om punkterna 1 och 2 inte löser problemet, stäng av och koppla ur styrningsenheten: - Kontrollera säkringen i stickkontakten (3A). - Kontrollera säkringen i styrningsenheten (1A)." - Starta om styrenheten.
 Lågtryckslarmets LED (4) lyser konstant gult; ett hörbart larm hörs.	Trycket har sjunkit under de minimala driftkraven.	- Tryck på knappen för att tysta larmet. - Kontrollera att HLR-ventilen är ordentligt stängd och att alla tätande kopplingar är helt isatta. - Kontrollera att varje luftcell är ordentligt ansluten till den tillhörande luftcellsslangen. - Kontrollera alla luftceller och slangar för eventuellt luftläckage.
 Högtryckslarmets LED (5) lyser konstant gult; ett hörbart larm hörs.	Luftflödet mellan styrningsenheten och plattformen är blockerat.	- Tryck på knappen för att tysta larmet. - Kontrollera om luftslangarna mellan plattformen och styrenheten är böjda eller klämda. - Åtgärda problemet och vänta på att larmet återställs.
 Service-LED (6) lyser konstant orange.	Service krävs.	"Vänligen kontakta ComfortSystems kundtjänst för support Tel. +46 (0)36-51590 Styrenheten kommer att fortsätta fungera även om service-LED:en förblir tänd."
 Gränssnittspanelen är belyst men svarar inte.	Gränssnittspanelen är låst.	- Kontrollera att LED-lampan för skärmlås (9) lyser orange. - Tryck och håll in knappen för att tysta larmet i fyra sekunder.
 Ett hörbart larm ljuder; inga LED-lampor är tända.	- Strömkabeln har avlägsnats av misstag. - Strömmen från vägguttaget har av misstag stängts av. - Strömavbrott i elnätet.	- Anslut strömkabeln till styrningsenheten igen. - Kontrollera att det finns ström i vägguttaget. - Försök starta om styrenheten.



Felsökning fungerar inte?

Om du behöver ytterligare hjälp med felsökning eller reparation av ditt Toto-system, vänligen ring numret nedan.

Ytterligare information finns på tillverkarens webbplats www.frontier-group.co.uk



Frontier Therapeutics Limited
Innova One, Tredegar Business Park, Tredegar,
Blaenau Gwent NP22 3EL United Kingdom.

Tel: +44 (0)330 460 6030
Email: info@frontier-group.co.uk

www.frontier-group.co.uk



© October 2025 Frontier Therapeutics Limited.
All rights reserved. GP0133_A57_10