


Handkontroll och Fotkontroll

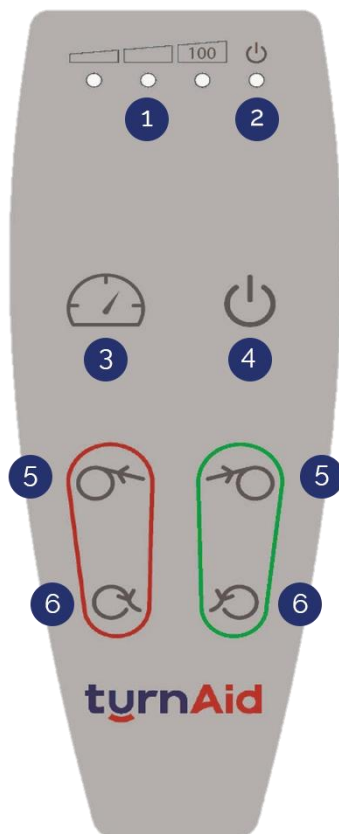

1. Lysdioder för hastighetsindikering.

2. ON lysdioden:

→ Lyser gult, när systemet är aktivt

→ Om systemet inte är aktivt, släcks lysdioden.

→ När den gula ON-dioden lyser: ska vårdgivaren omgående använda TurnAid T4 systemet.

3. Hastighet/Speed Control:

Skiftar mellan 100 -75 -50 % i hastighet.

4. HANDKONTROLL ON-knapp:

→ För att aktivera systemet genom att trycka två gånger efter varandra.

→ Kan också användas som STOP-knapp vid ett långt tryck på över 2 sekunder.

4. AKTIVERING AV FOTKONTROLL ON-knapp:

→ Tryck två gånger.

→ Fotkontroll inaktiveras automatisk efter 1,5 minut utan användning.

5. Användning av respektive röd och grön motorrulle:

Åtdragning av draglakan.

6. Användning av respektive röd och grön motorrulle:

Släckning av draglakan.

Rengöring av lakan

	Glidlakan	Draglakan
Beskrivning	levereras endast i vitt. 100% nylon.	Levereras endast i vitt. 50% polyester / 50% bomull.
Rengöringsanvisning	Innan tvätt, stäng kardborrebanden. Tvättas vid max. 95°C	Tvättas vid max. 95°C
Behandling	Torktumling vid normal temperatur. ÷ strykning	Torktumling vid normal temperatur. + strykning på ••

De tre funktionsinställningarna

Detaljerade instruktioner – se avsnitt 7.2 i användarmanual.



"Sänggrind - position"
(under vändning)
den ena sidan har rullen på toppen och den andra sidan fungerar som sänggrind.



"Vändposition"
(under vändning)
rullen på den ena sidan vänds från nedersta läget till översta läget.



"Nedfällde - position"
(ut ur sängposition eller från sida till sida)
avståndet till användaren minskas, vilket gör det lättare att arbeta med patienten vid exempelvis tvätt, påklädning, avklädning osv.



Våra
instruktionsfilmer.
ComfortSystem.



Hitta
Användarmanual.
Danrehab.

V.5 Quick Guide - 2026